


**CareStream**

**GUIA RÁPIDO**  
**Exportação de Arquivo**


---

**2021**




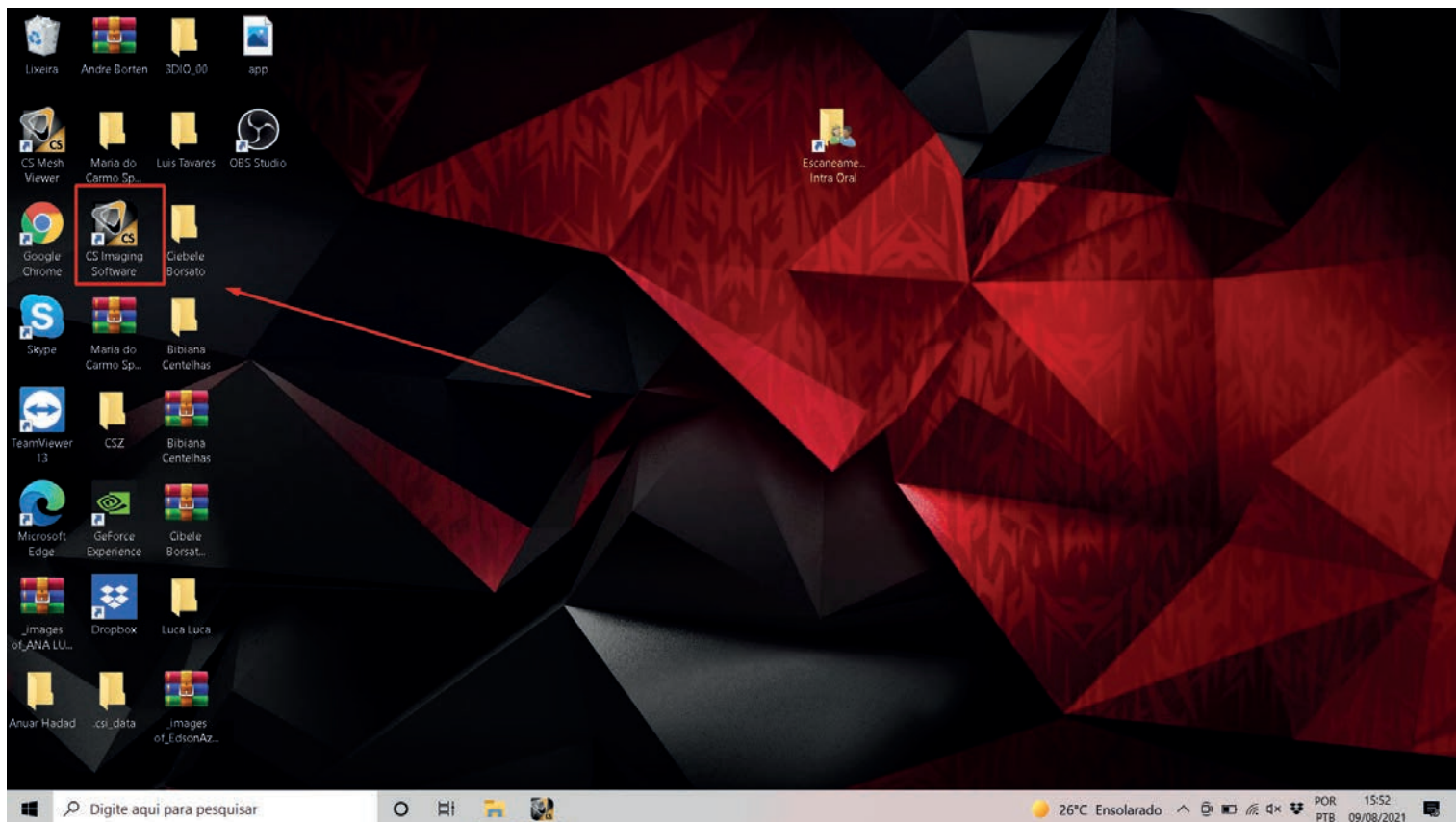


Abrir o Software do scanner

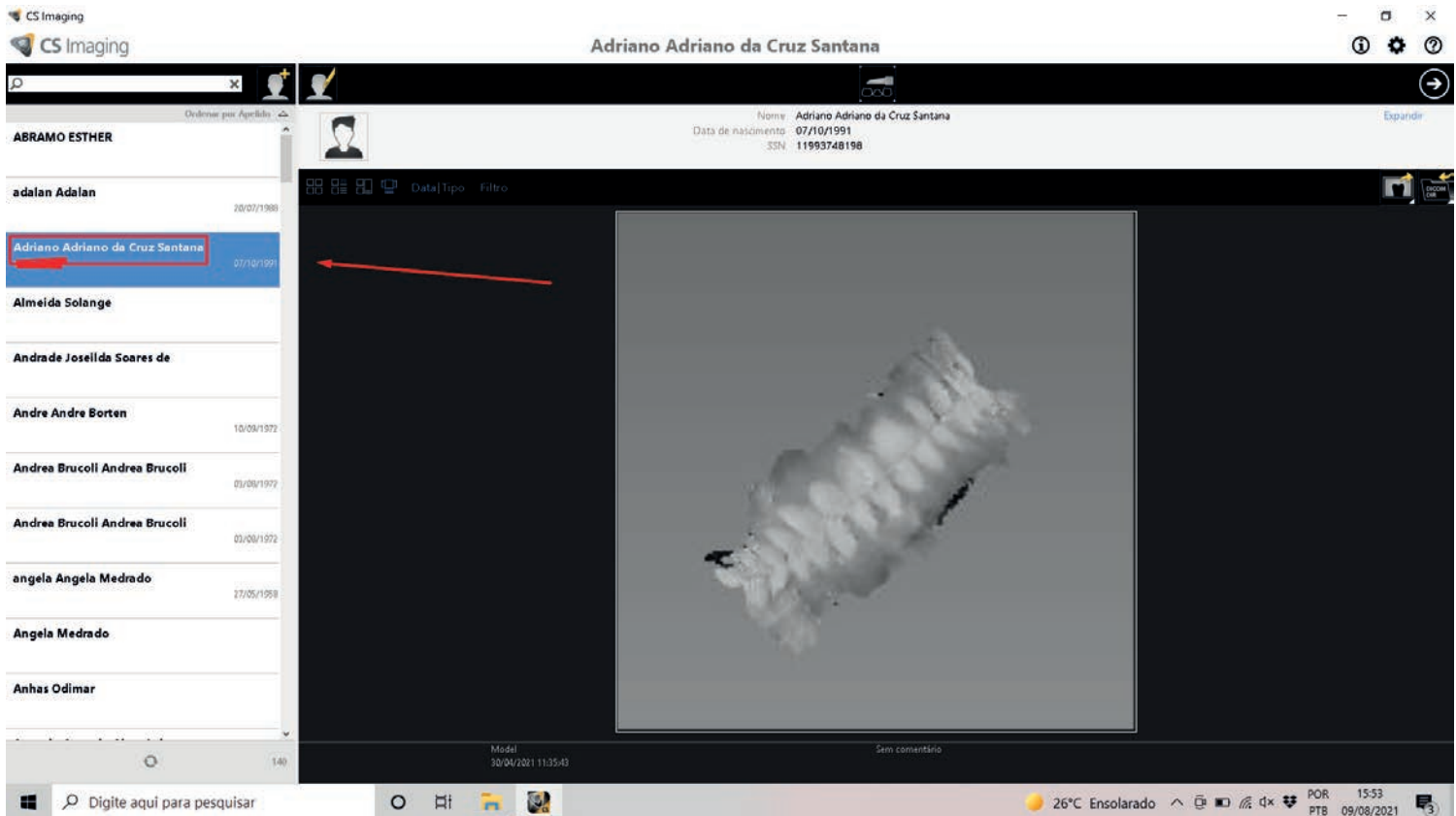


Procurar o paciente que deseja exportar

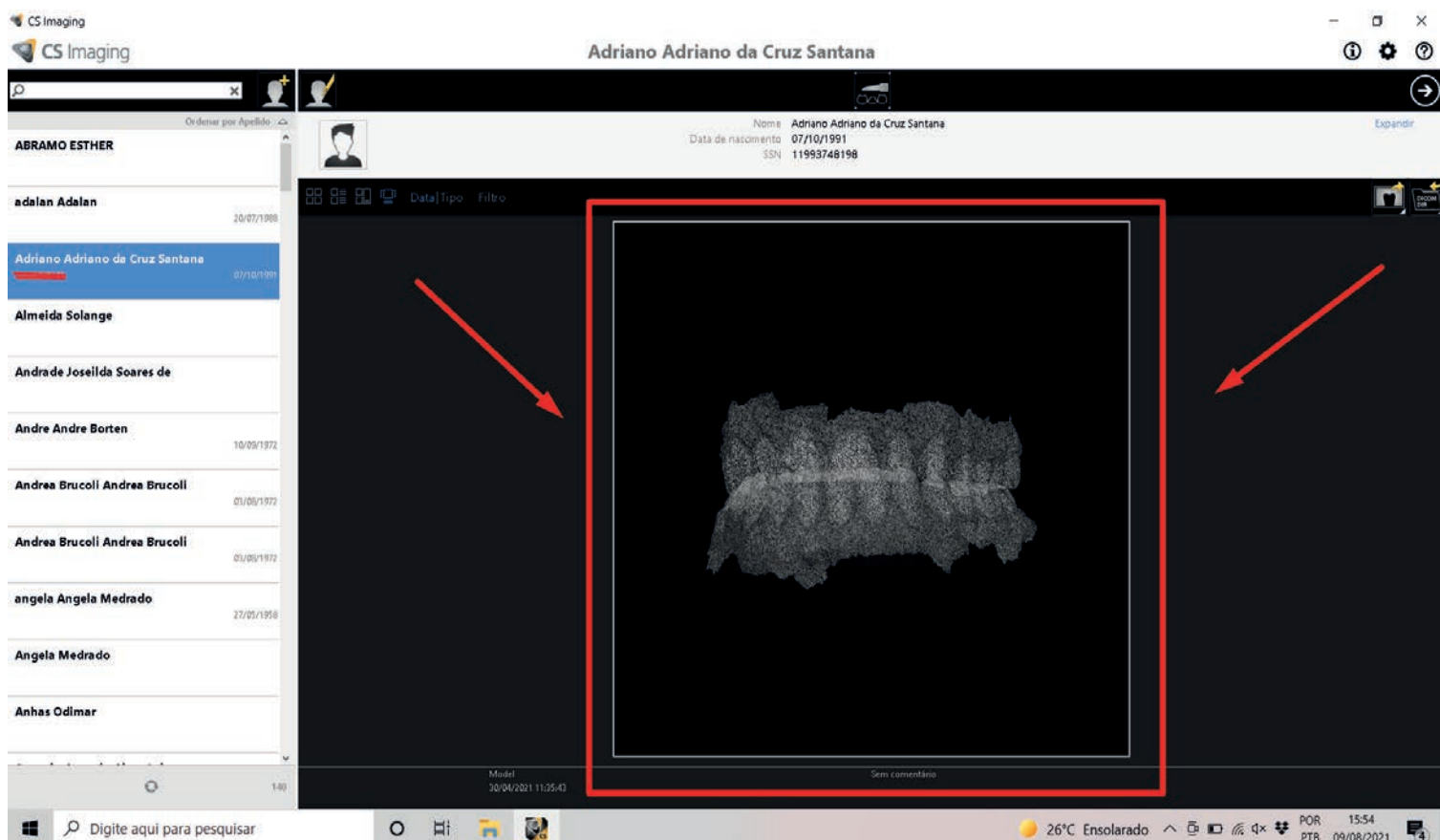


Clicar em **cima do arquivo** desejado  
(caso seja paciente que ja tenha  
sido cadastrado tera os  
escaneamentos anteriores)

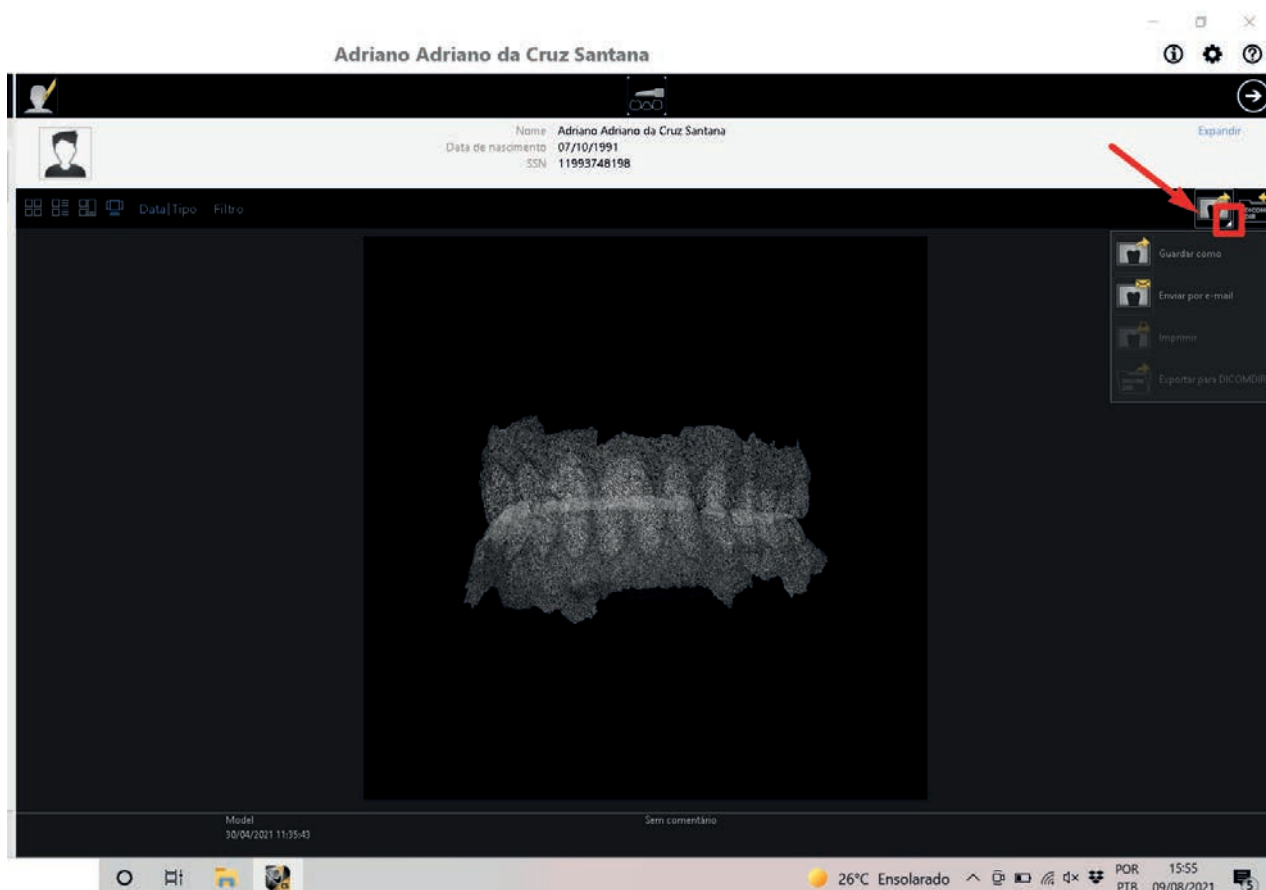


Clicar no mesmo local mostrado  
na imagem

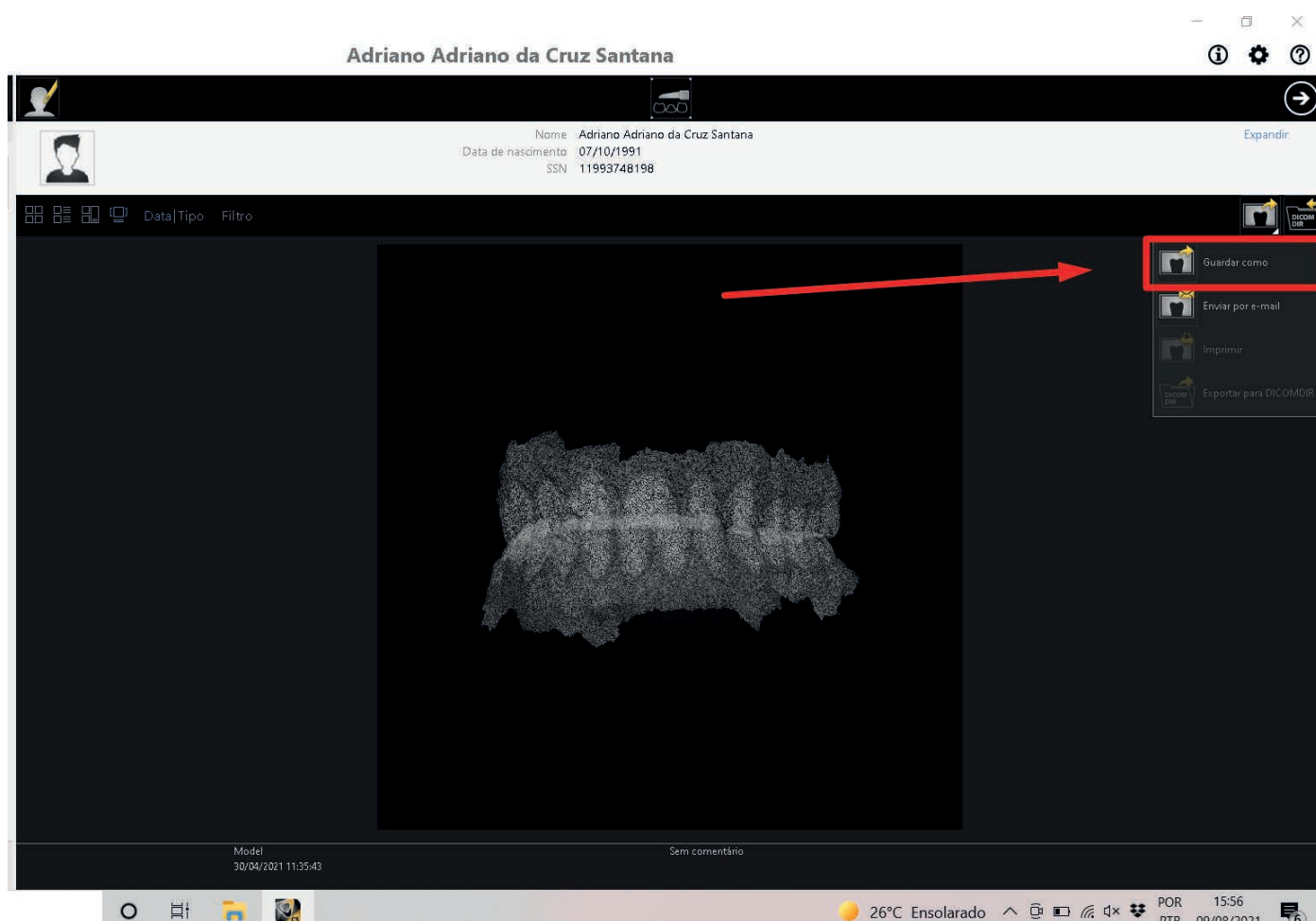

Clicar em **guardar como**

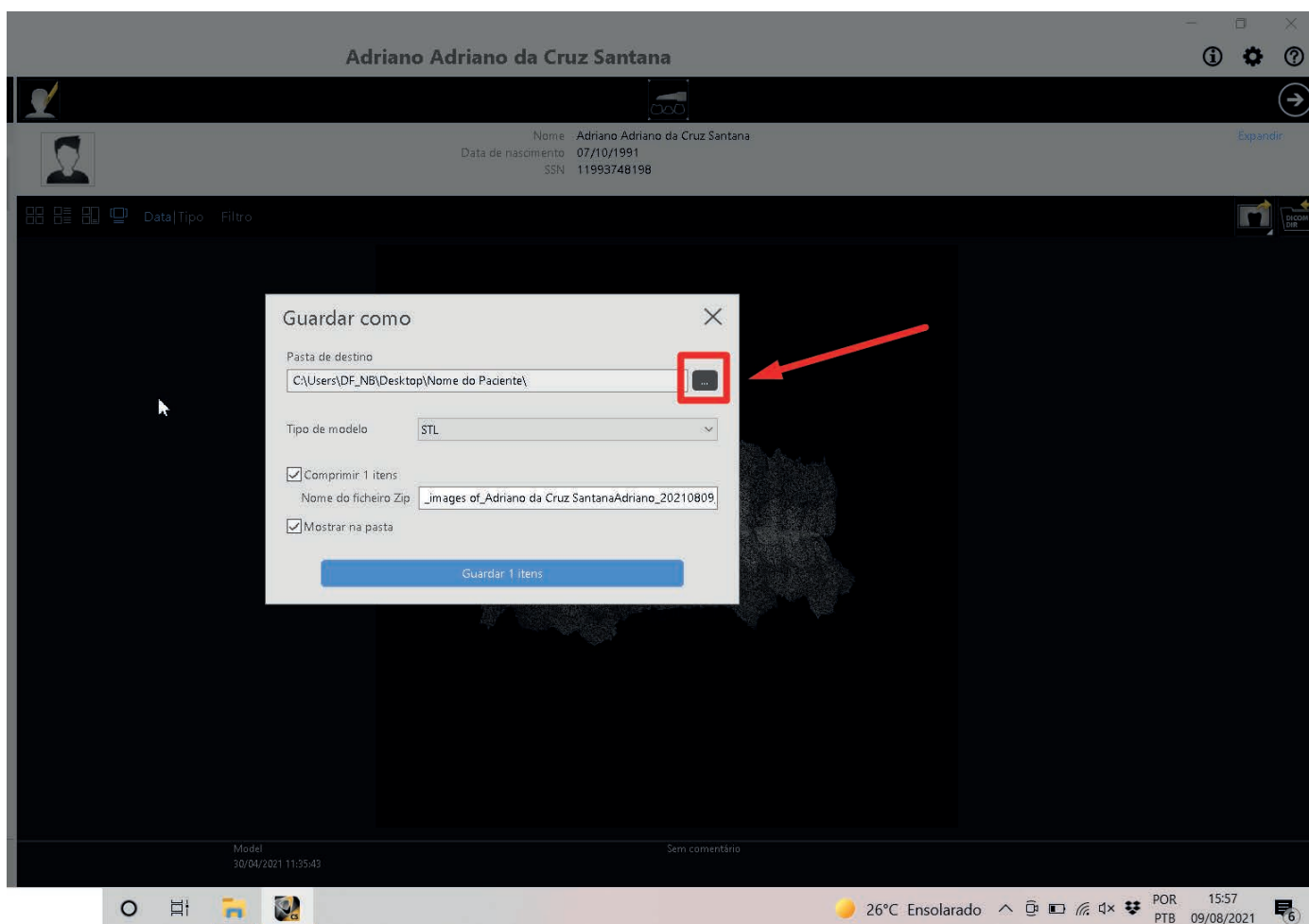


**Clicar nos 3 pontinhos** para escolher onde sera salvo o arquivo

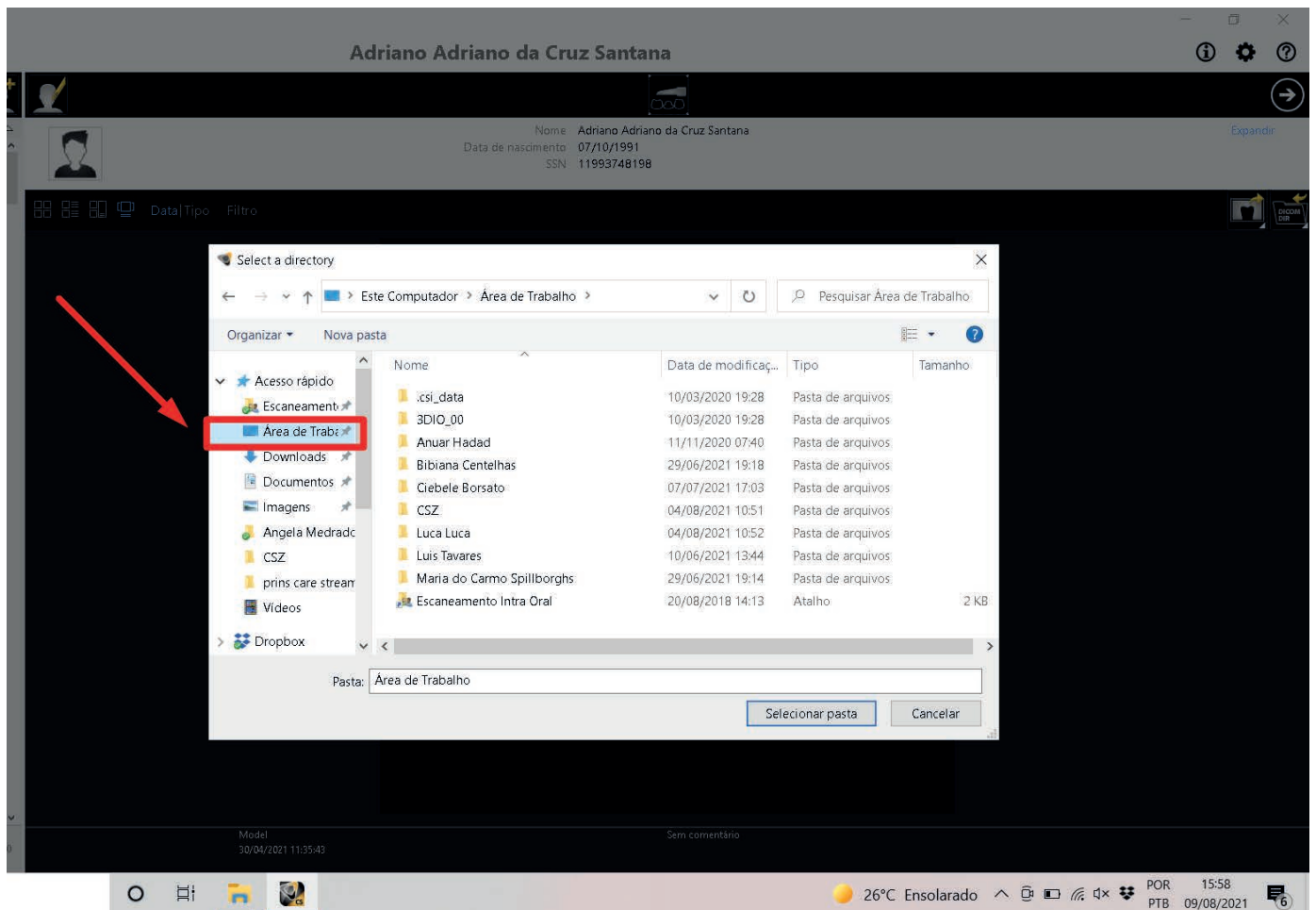


Salvar na Área de Trabalho




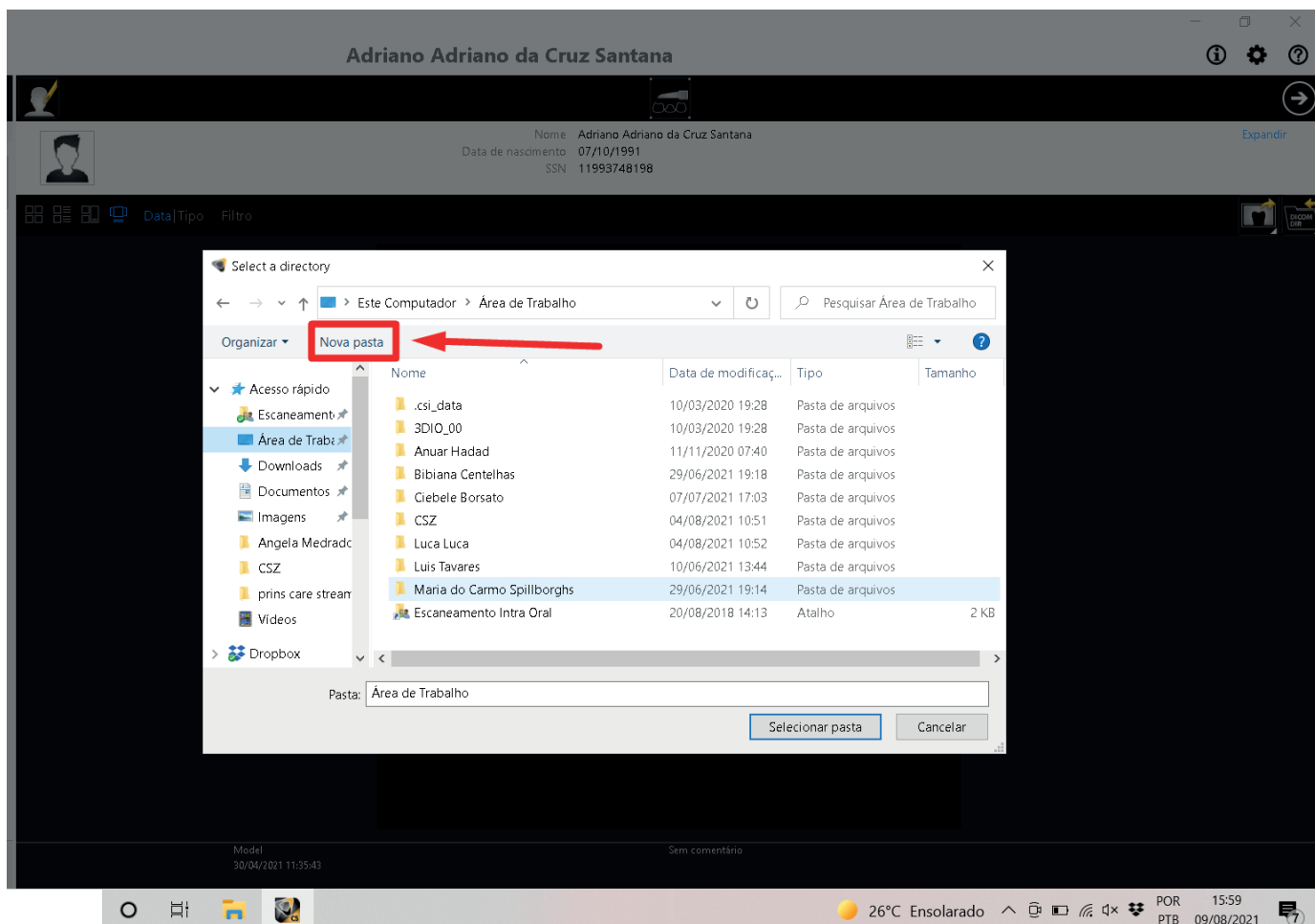


Clicar em **Nova Pasta**

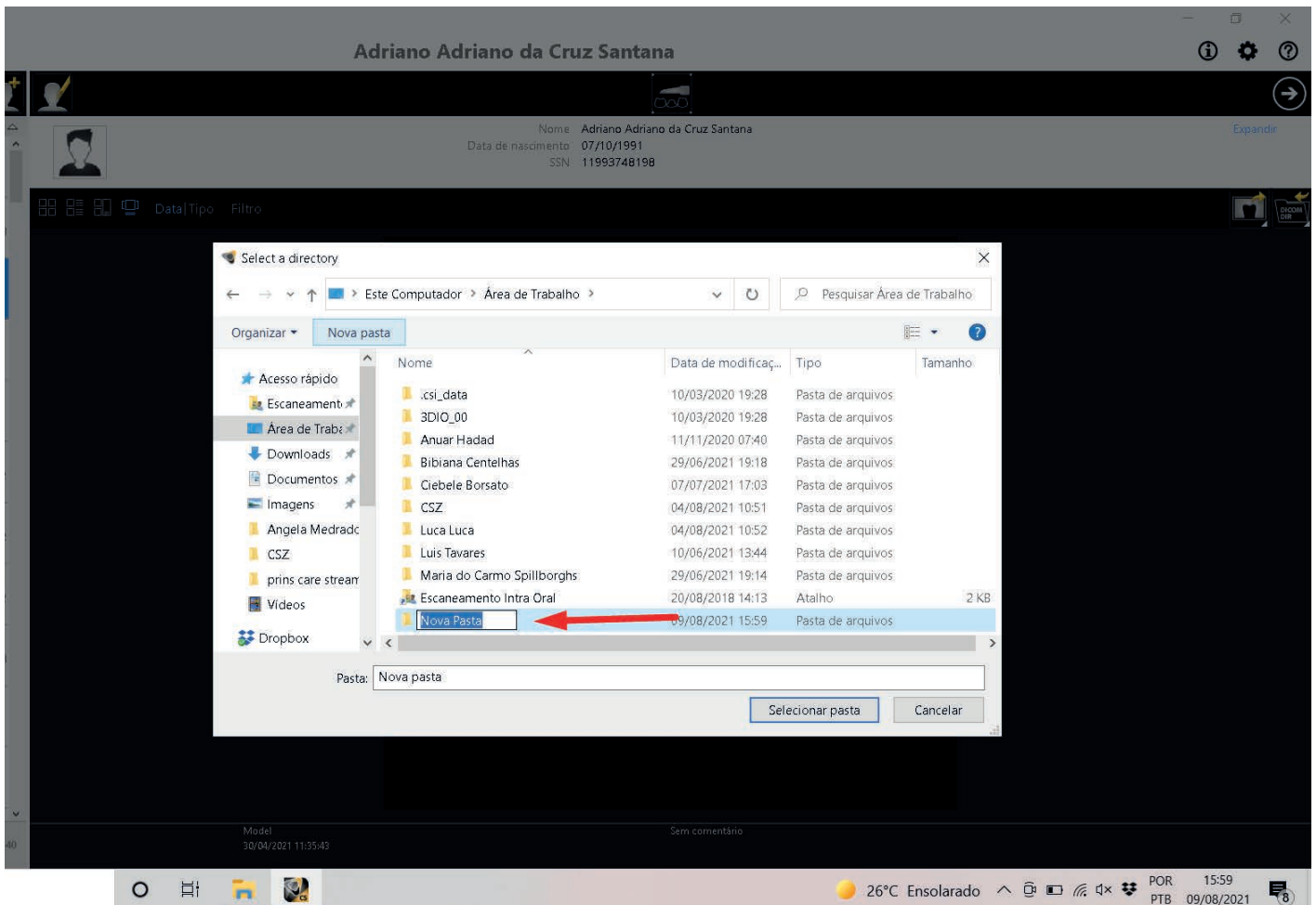


Renomear a nova pasta criada  
com o nome do paciente em  
questao

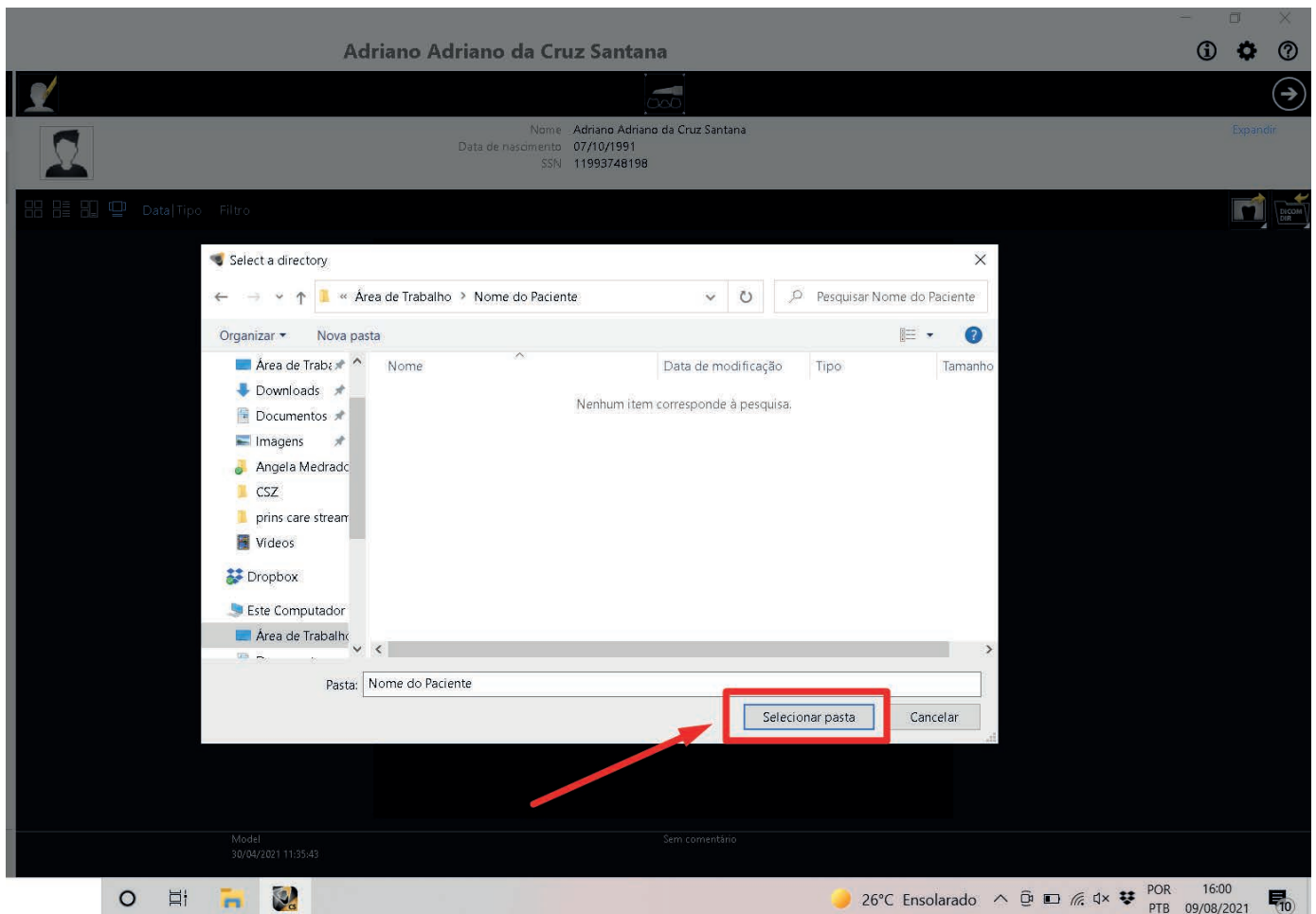


Abrir a pasta e clicar  
em  
**Selecionar Pasta**

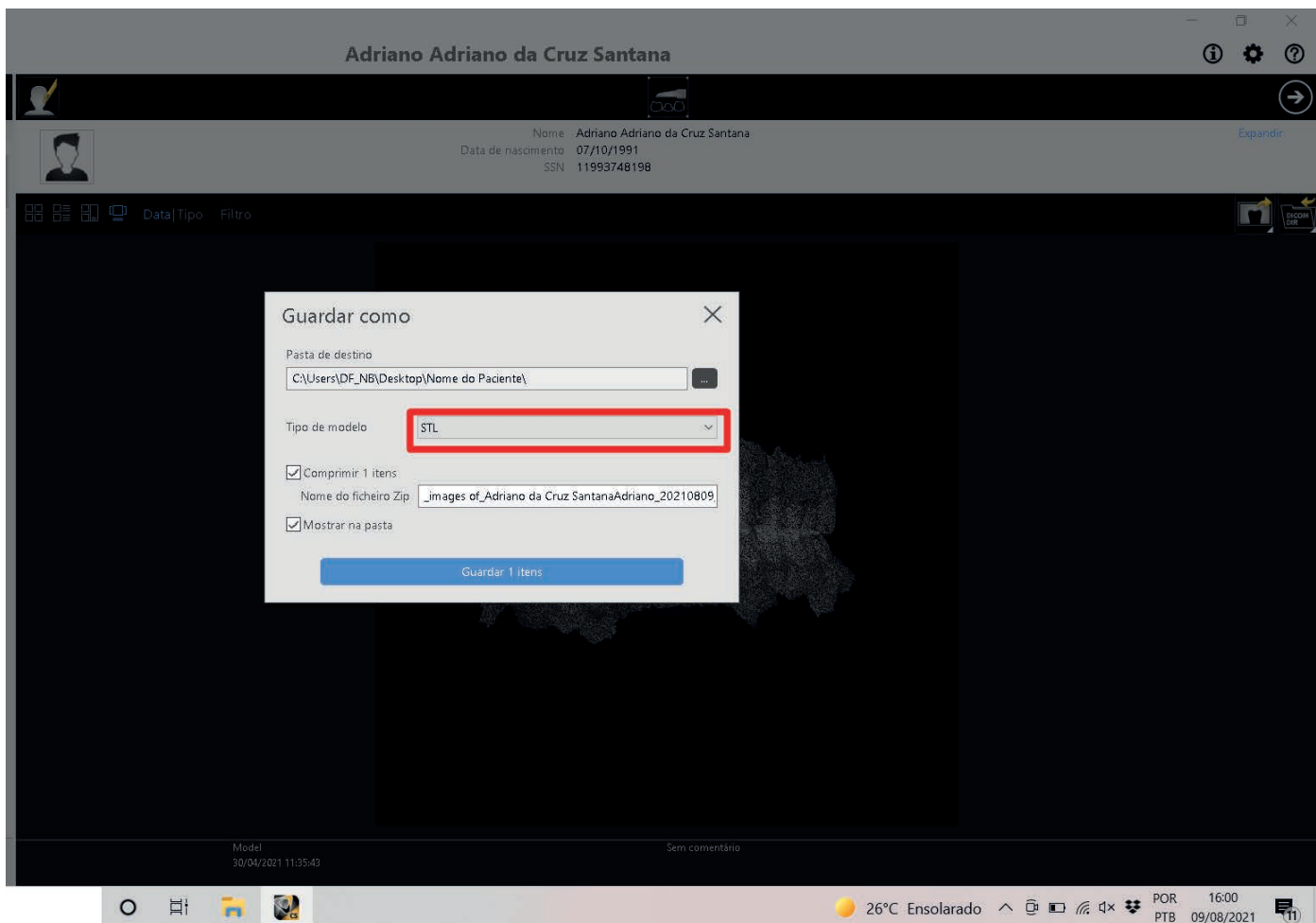


Selecionar o tipo de arquivo  
**STL:** Preto e Branco  
**PLY:** Colorido

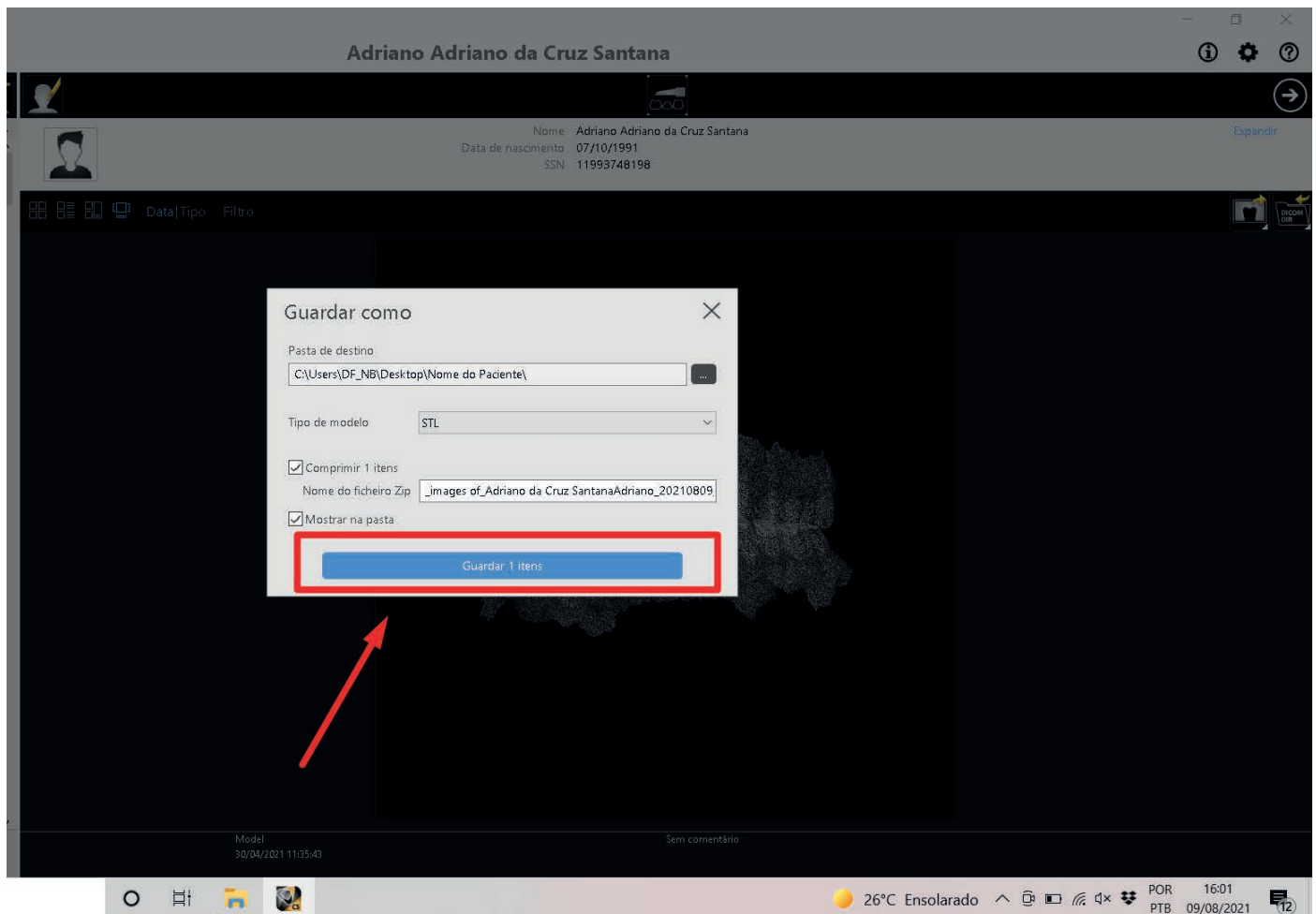


Clicar **Guardar Itens**

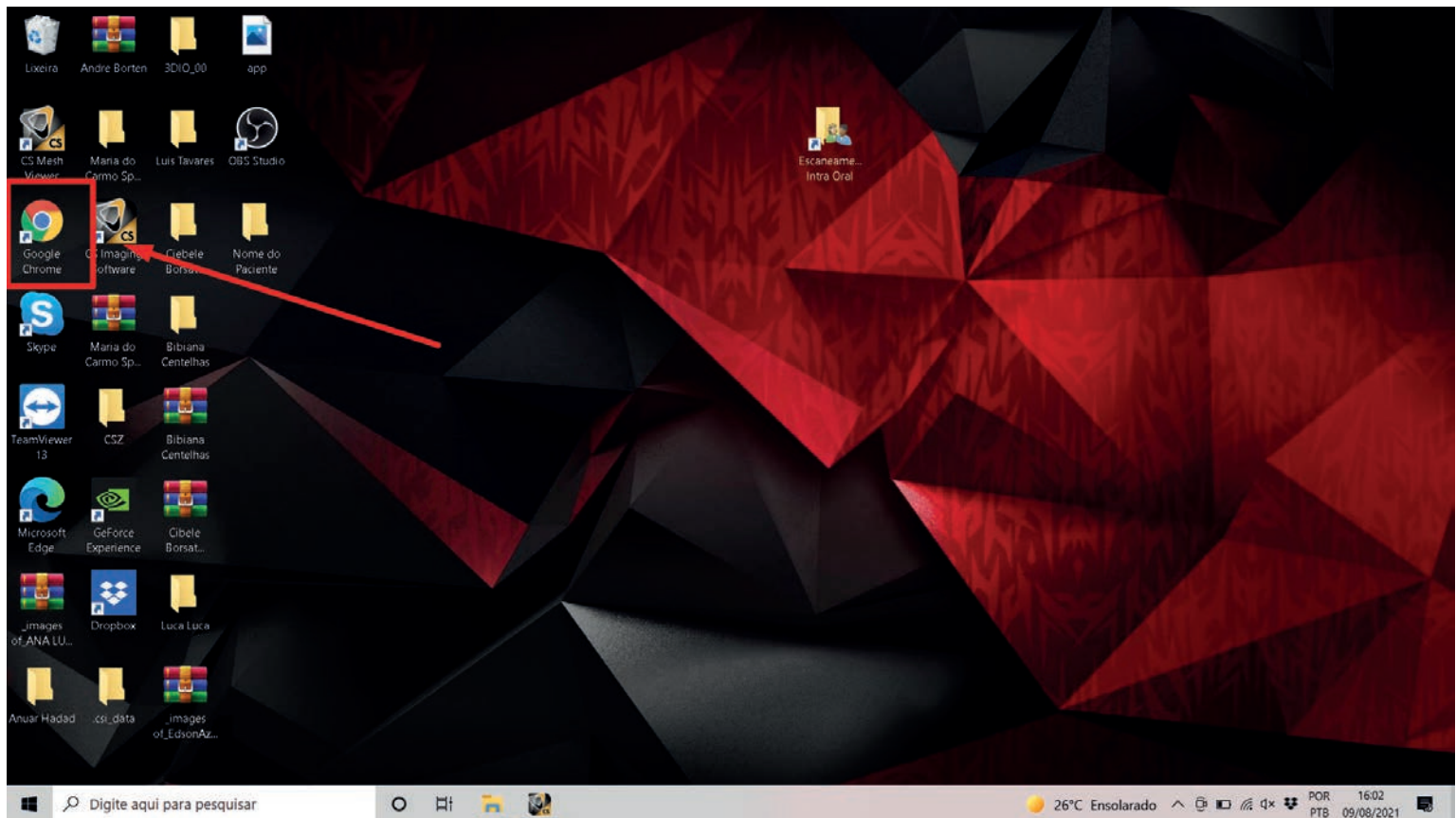

## Abrir o **Google Chrome**

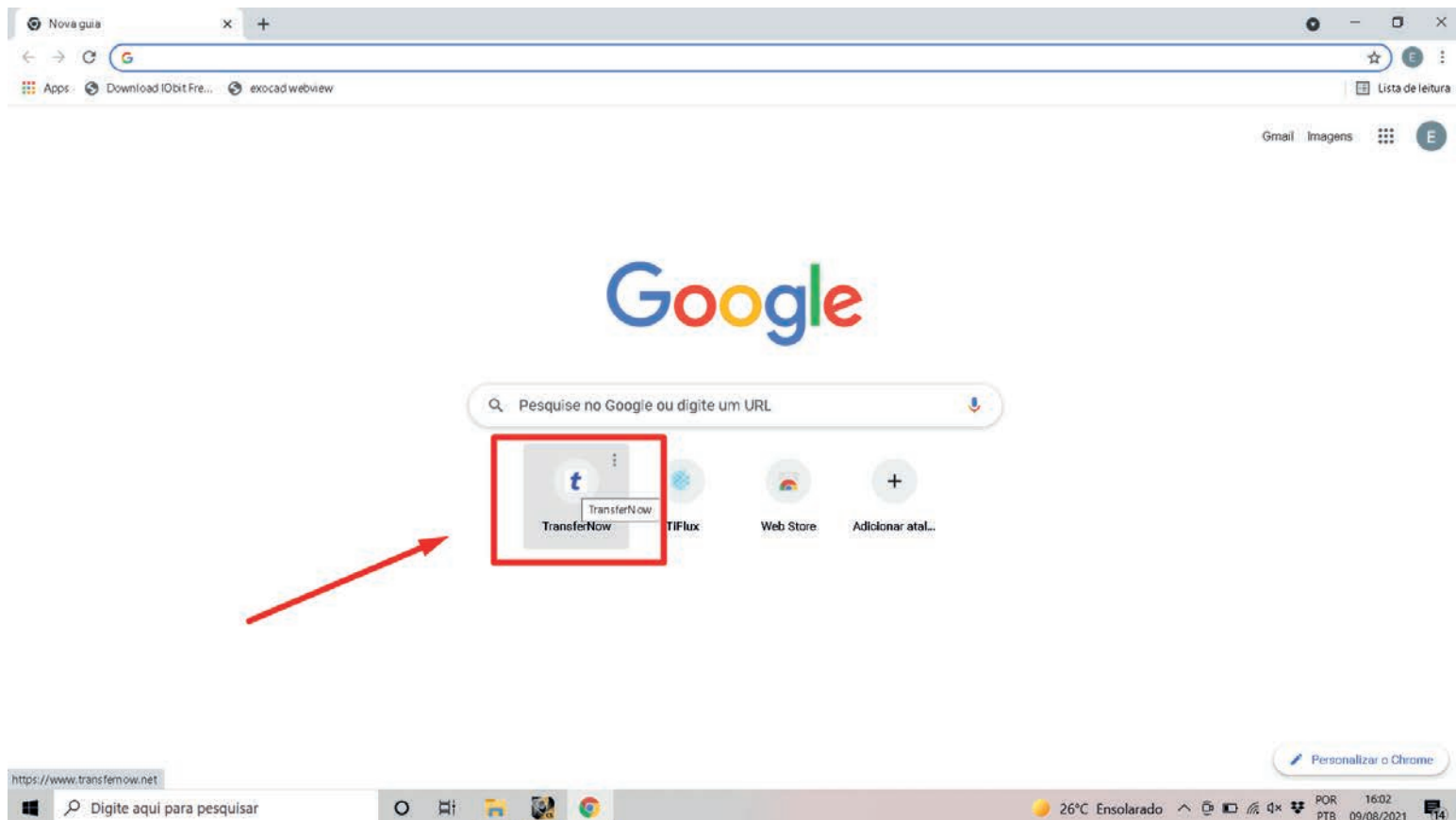


Abrir o site:  
<https://www.transfernnow.net/>

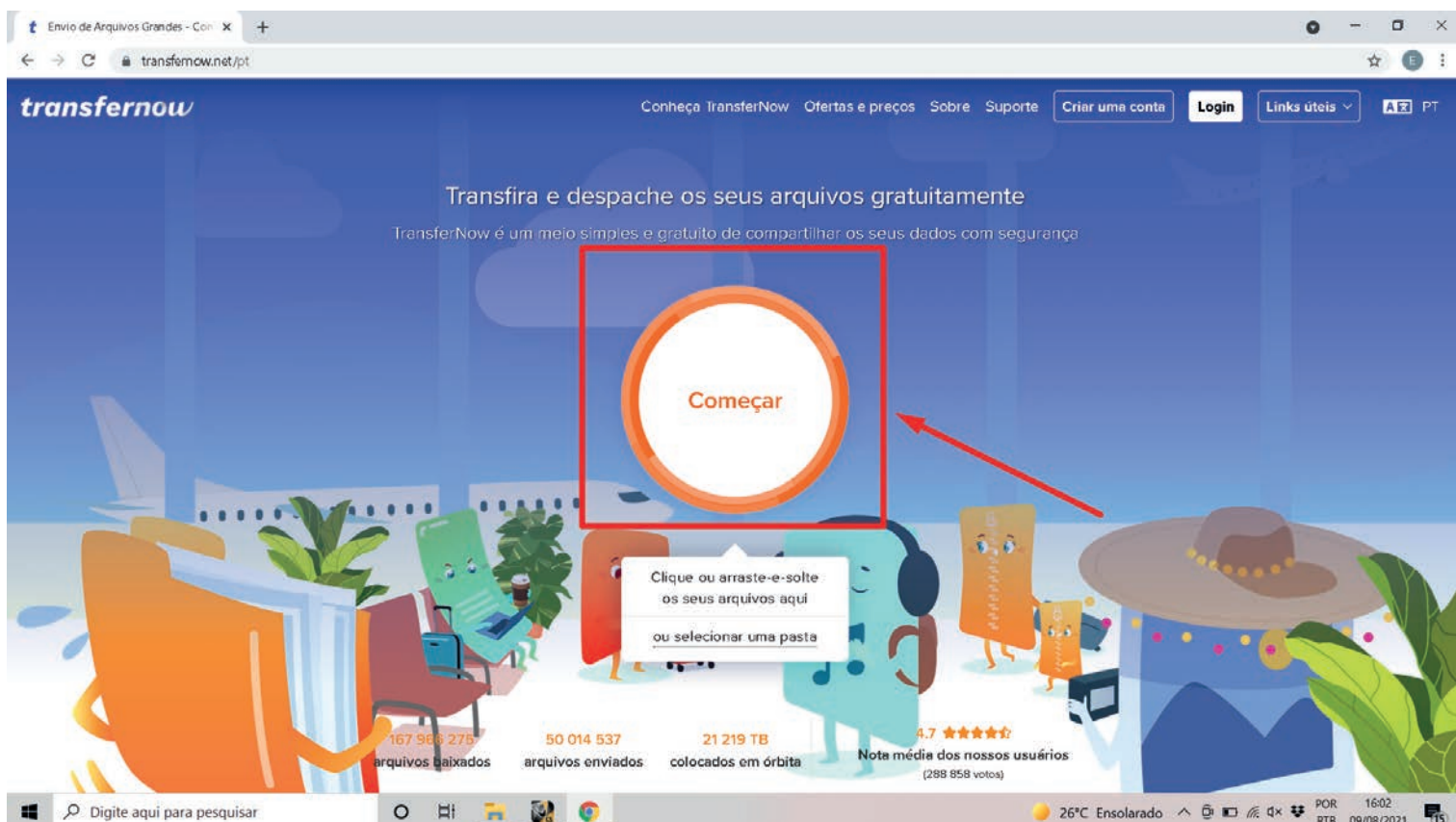


Clicar em **Começar**




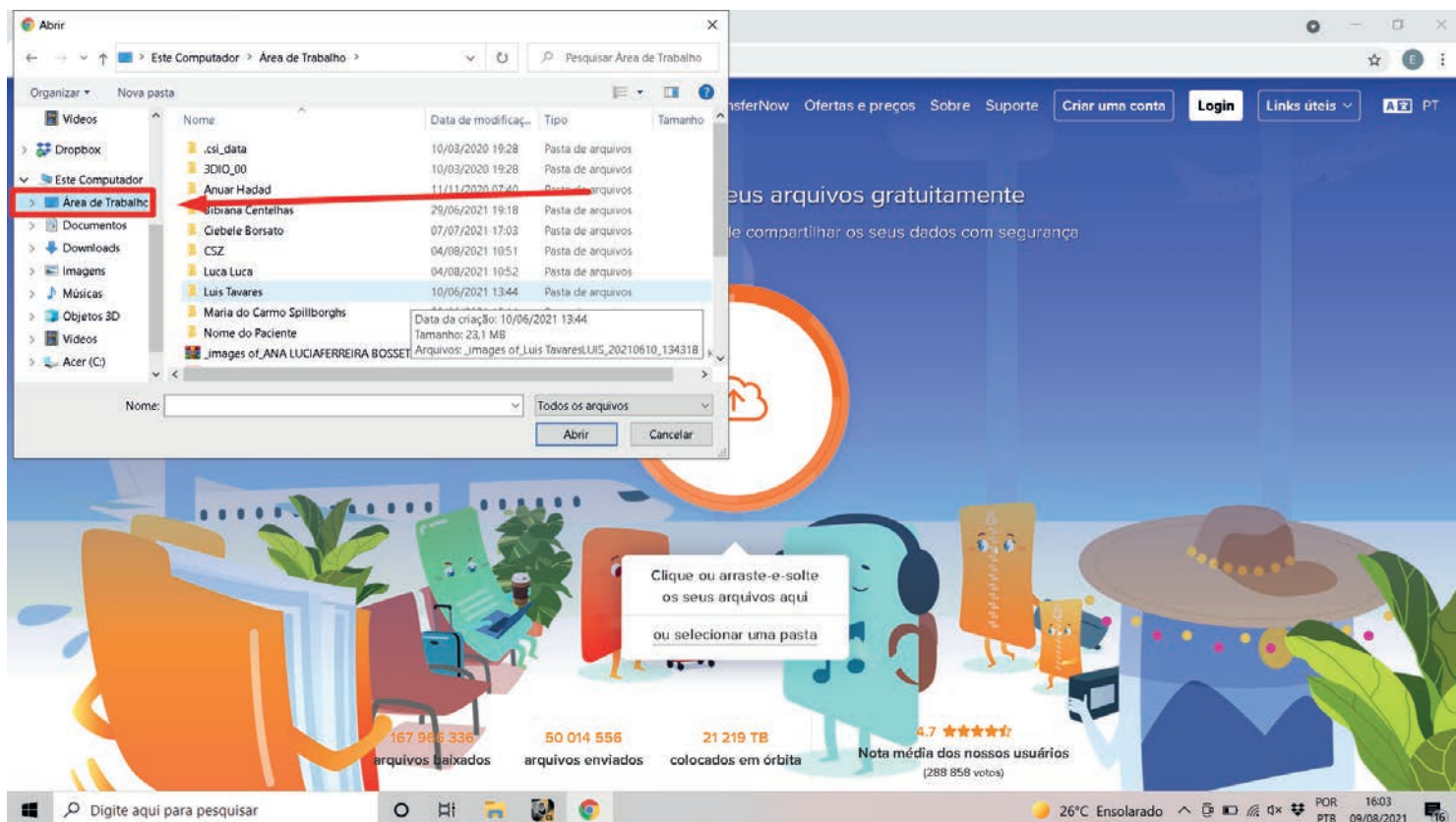


Clicar em **Area de Trabalho**

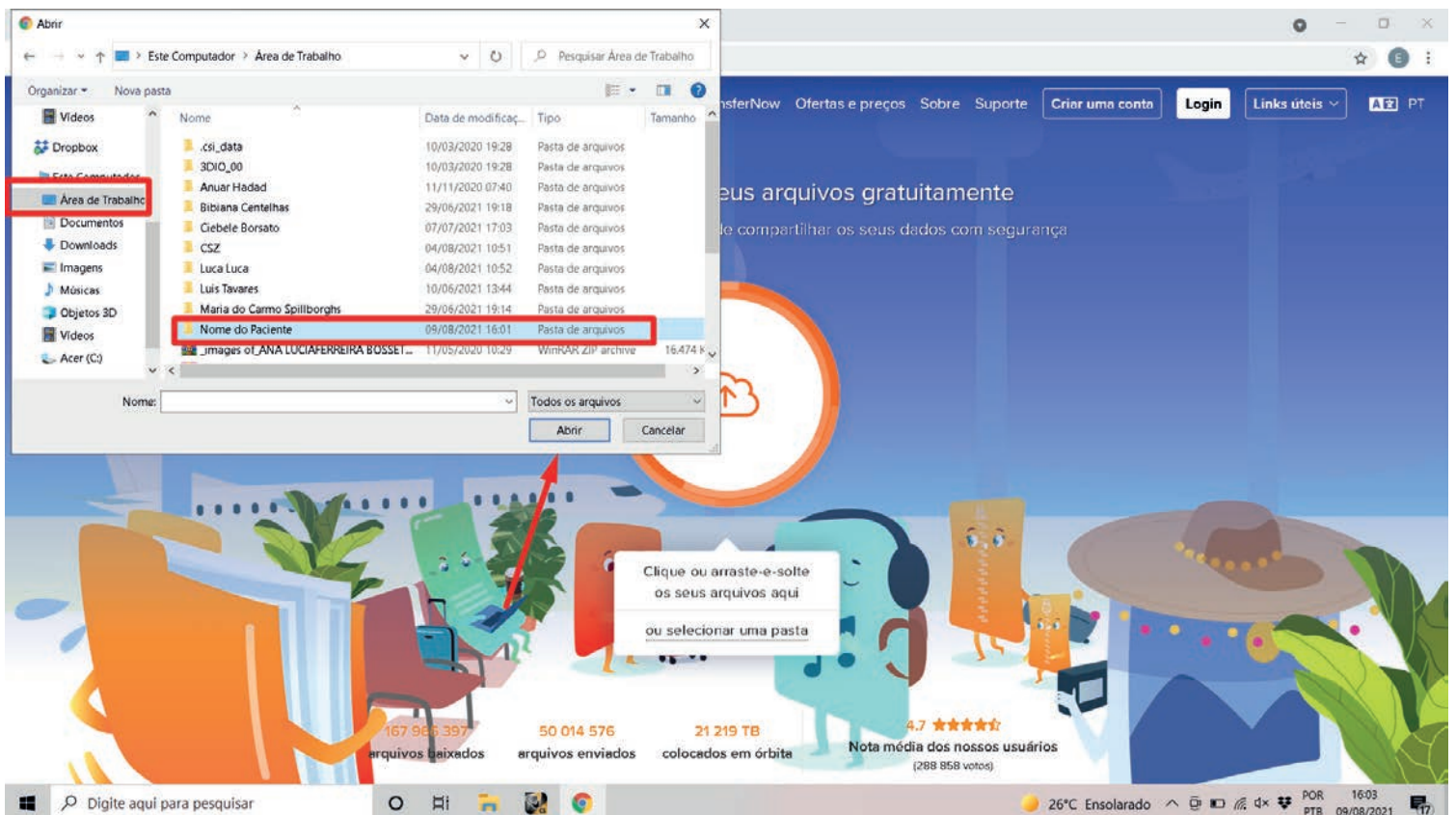


Procurar a pasta do seu paciente

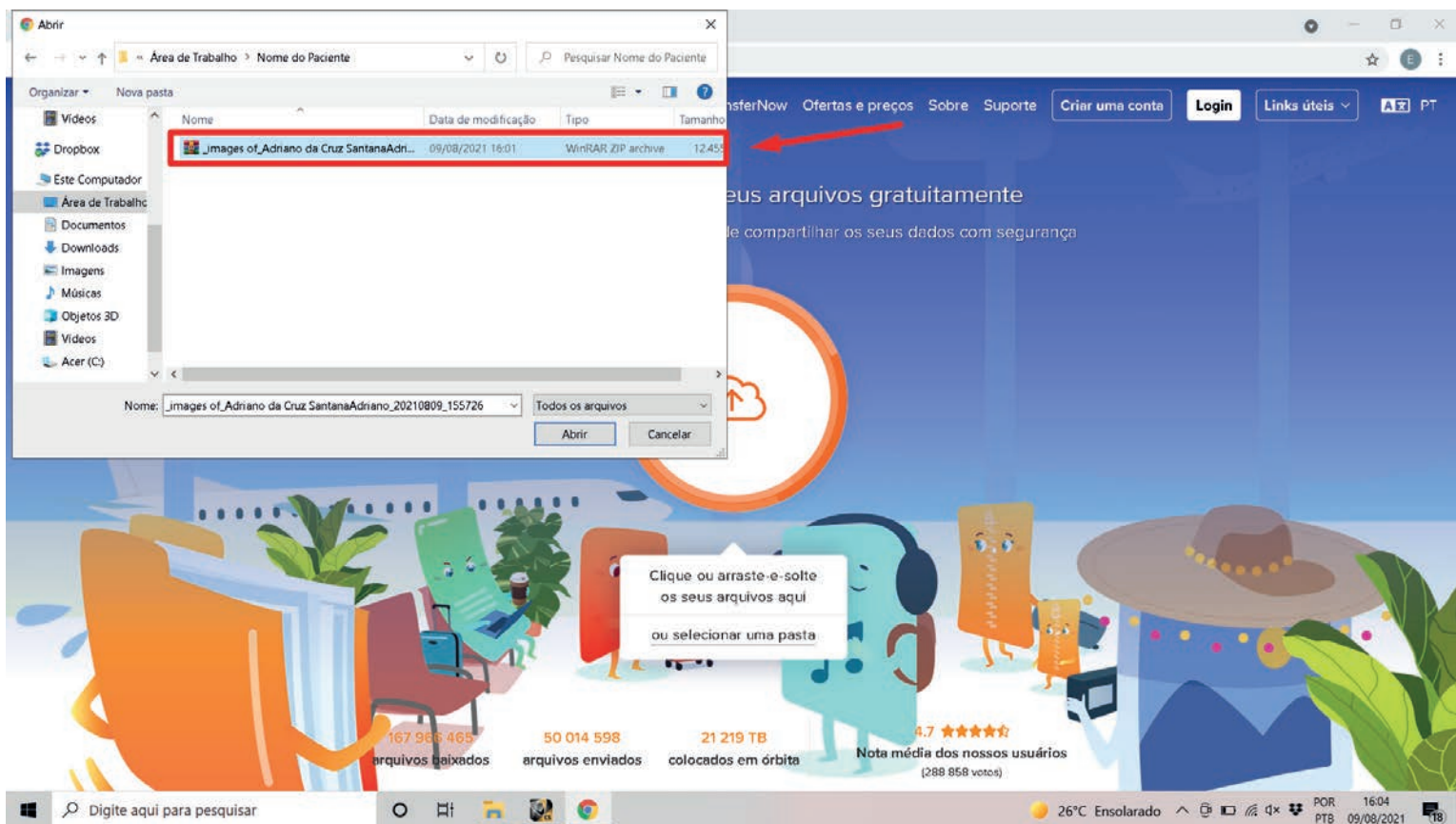


## Localizar o arquivo Zipado

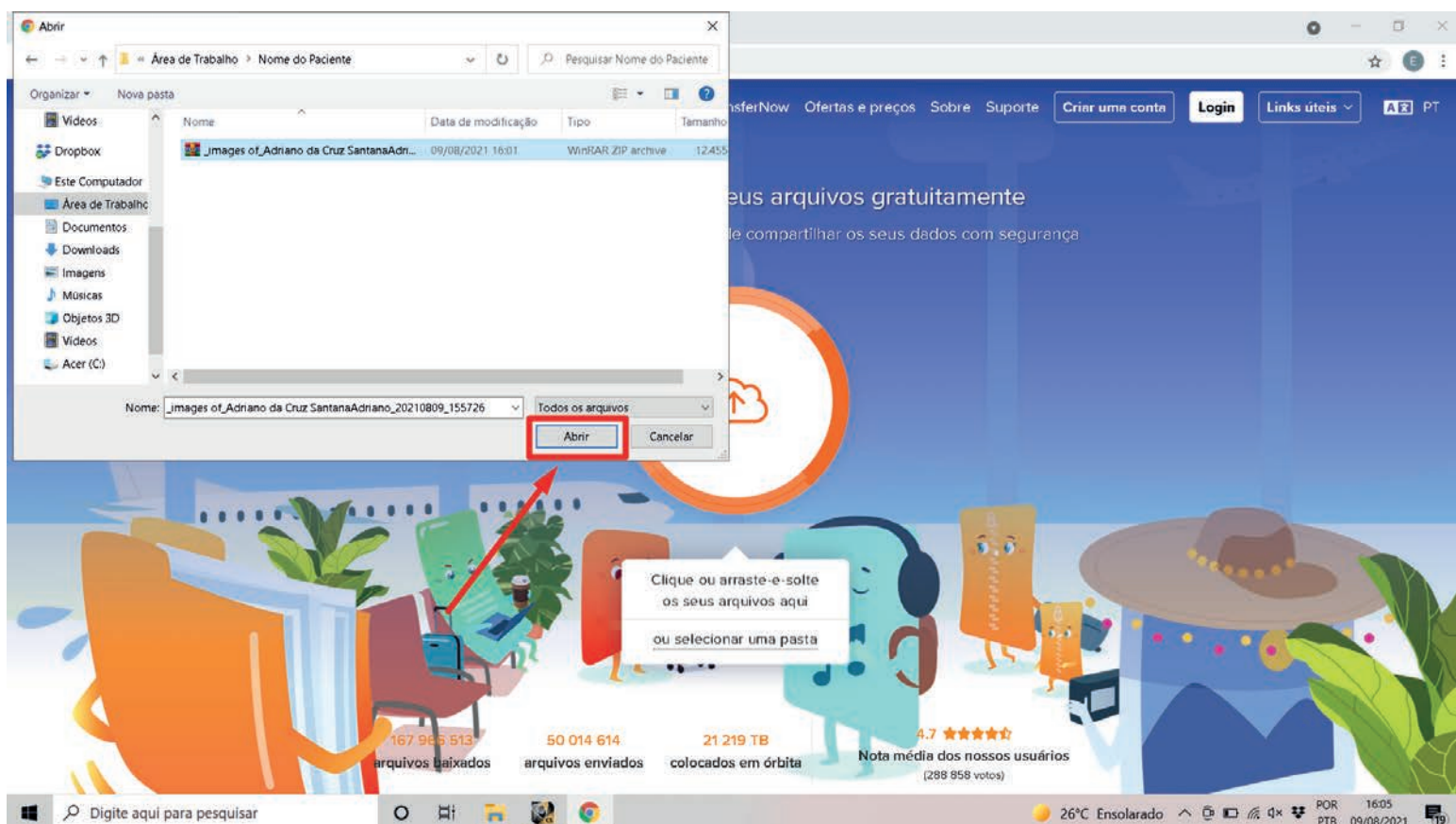


Clicar em **ABRIR**

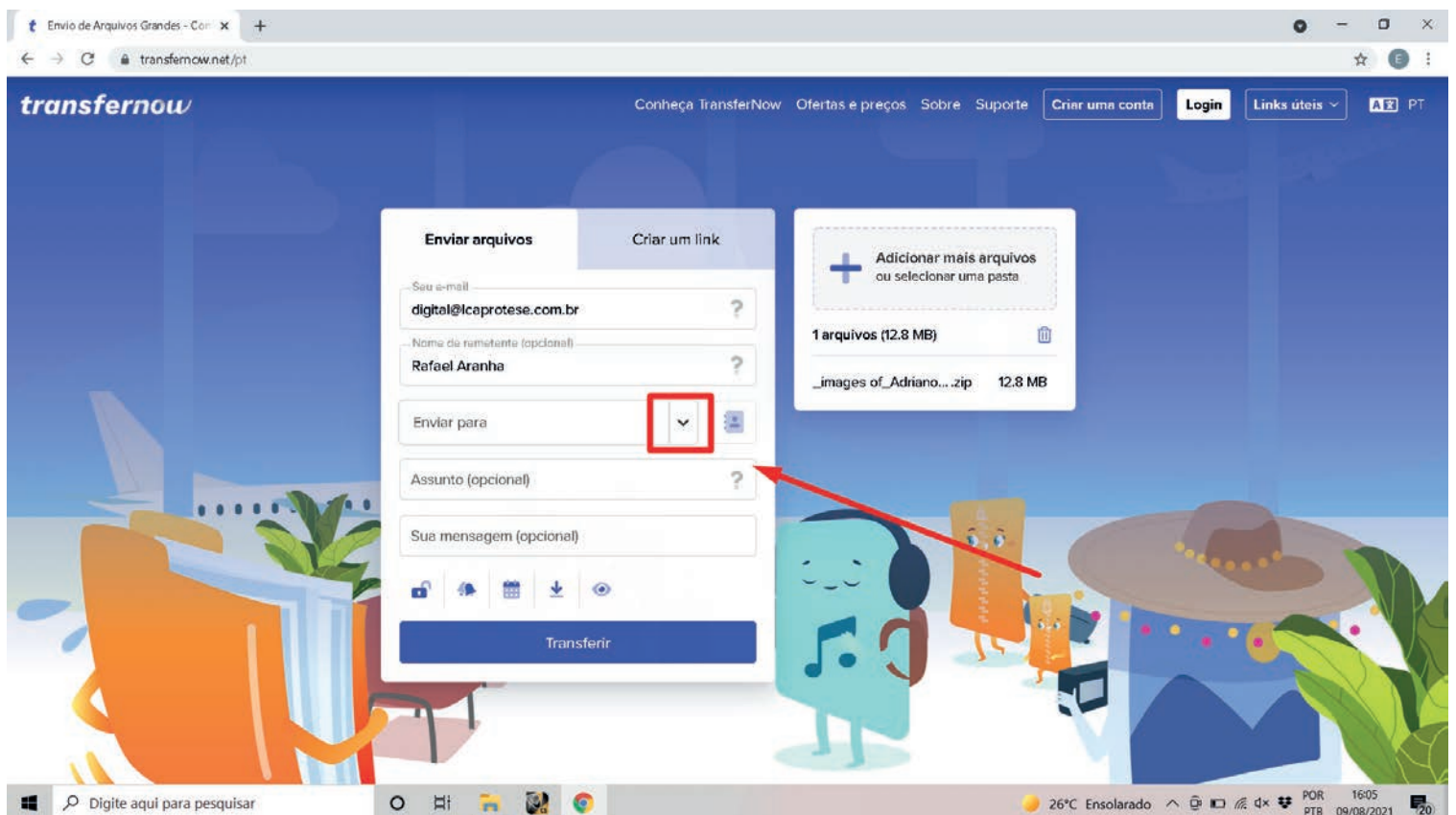


Clicar onde mostra a seta  
ou  
preencher o email :  
**digital@lcaprotese.com.br**

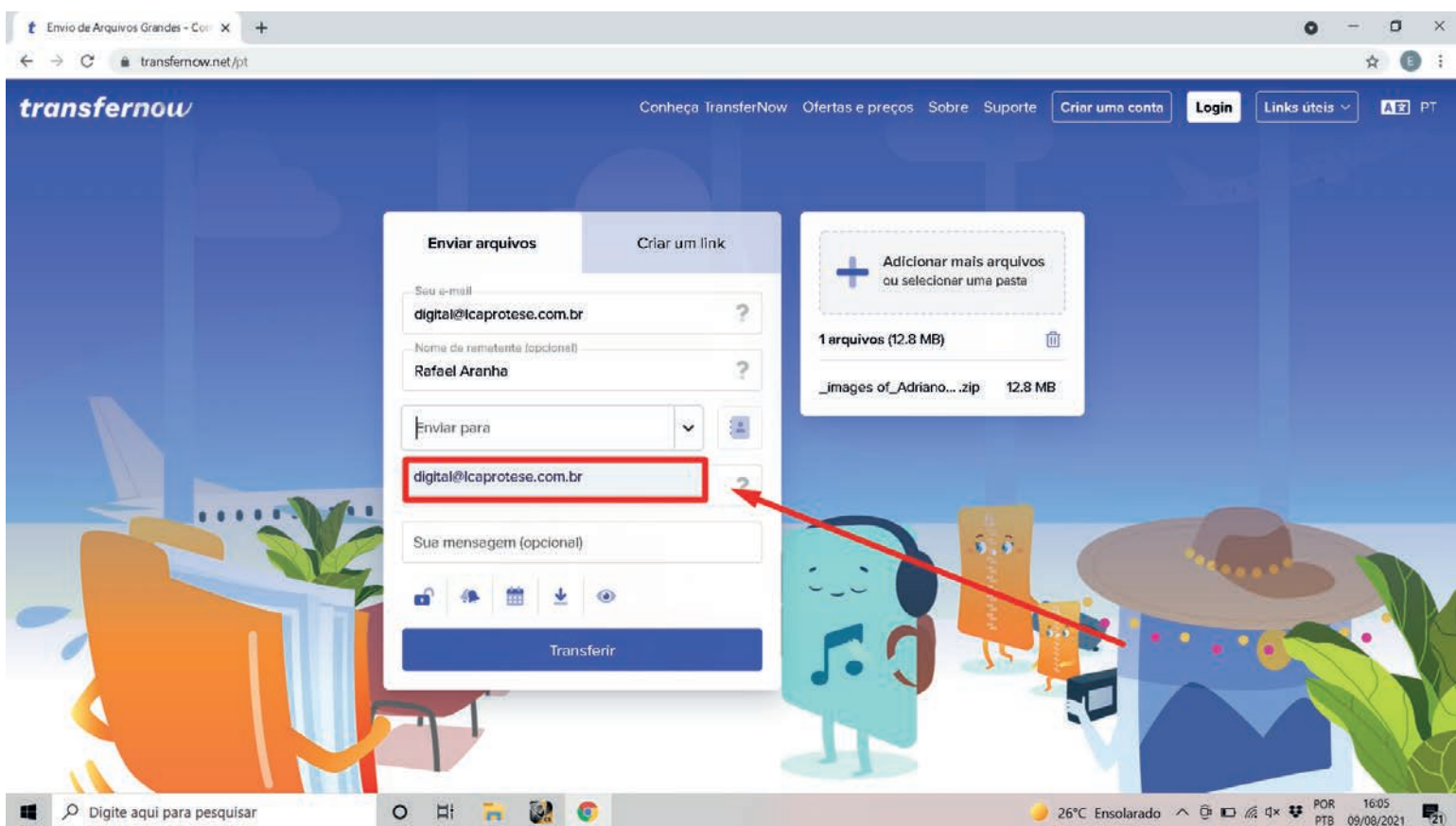

Caso tenha clicado na seta  
selecionar o nosso email:  
**digital@lcaprotese.com.br**

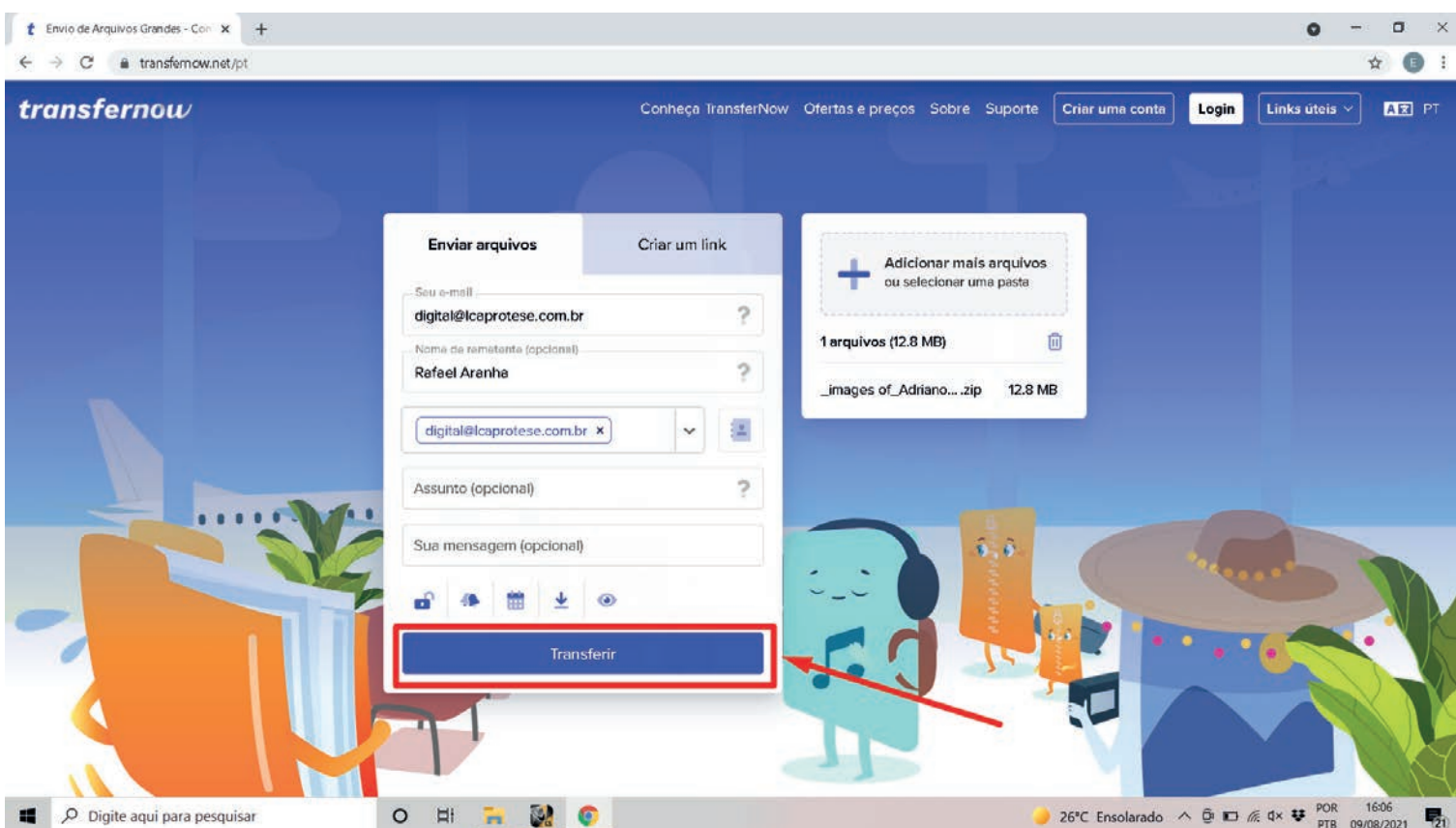


Clicar em **TRANSFERIR**

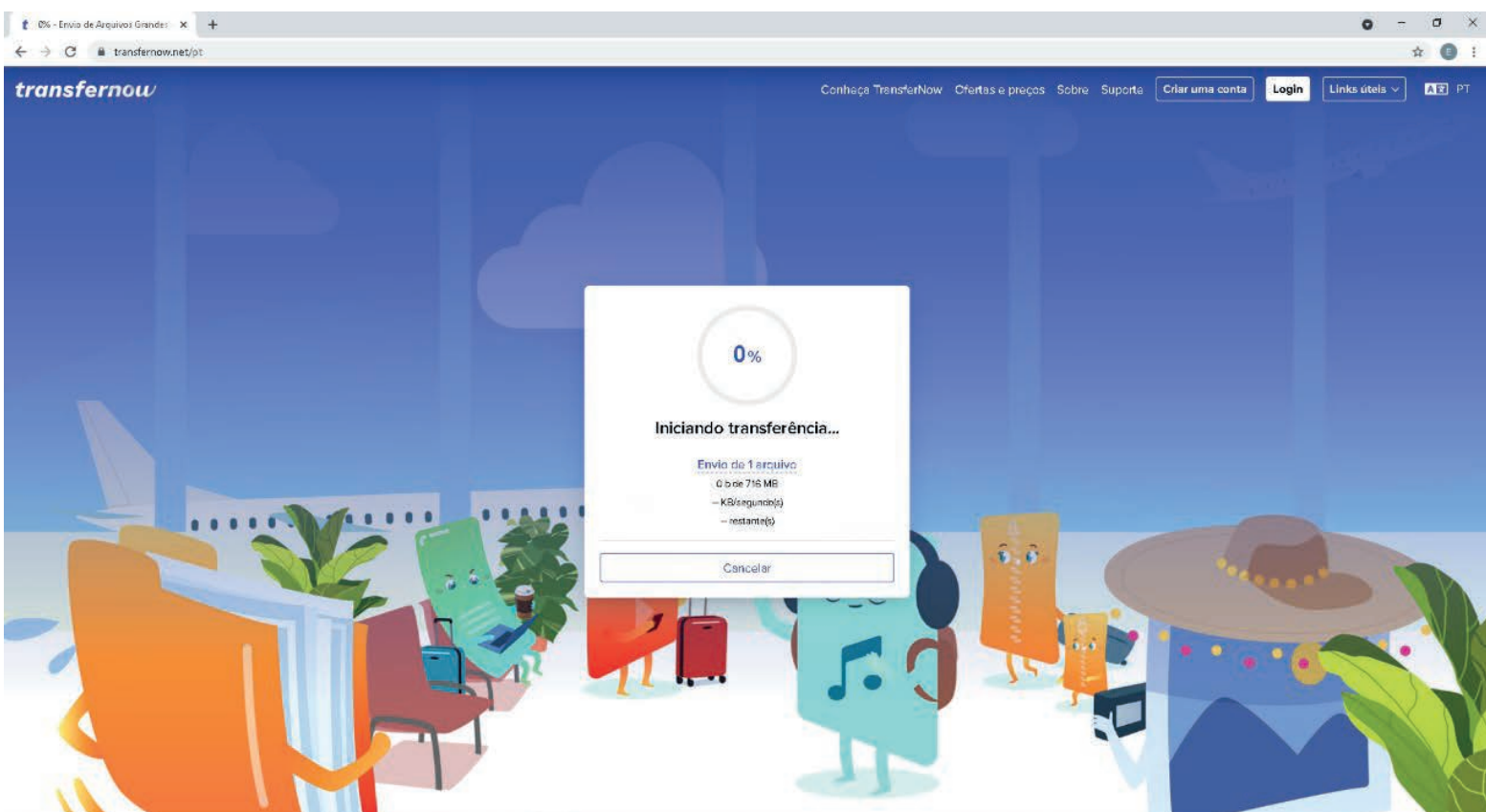

Aguardar carregar totalmente  
a transferência do Arquivo



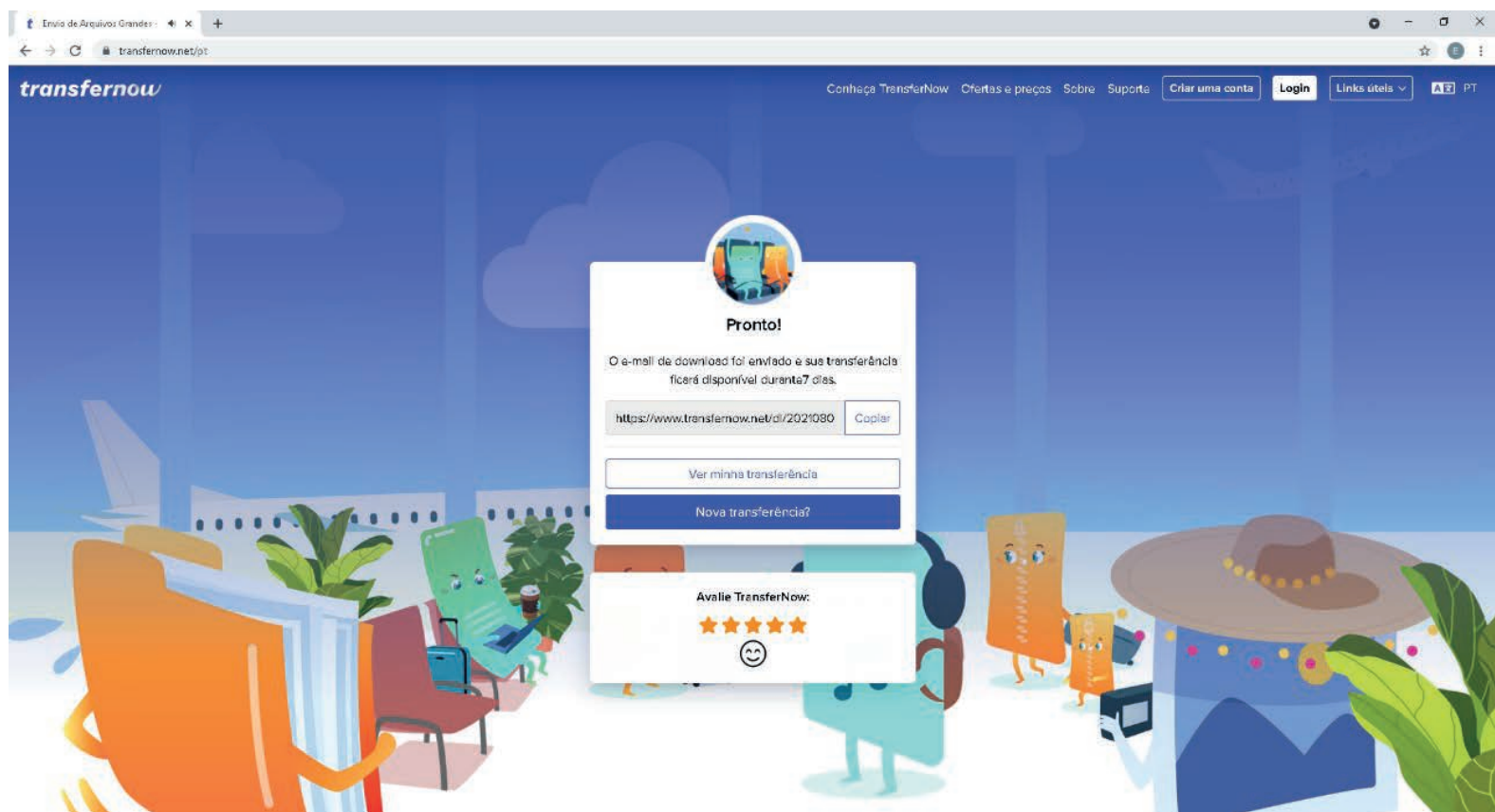

Pronto seu arquivo foi enviado

Se persistir a duvida segue tutorial  
rapido em video abaixo:



Clique no ícone para abrir



**Clique nos ícones e nos  
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria  
técnica entre em contato conosco.**



**OBRIGADO!**