


Ibero

GUIA RÁPIDO
Exportação de Arquivo
iRecord

2023



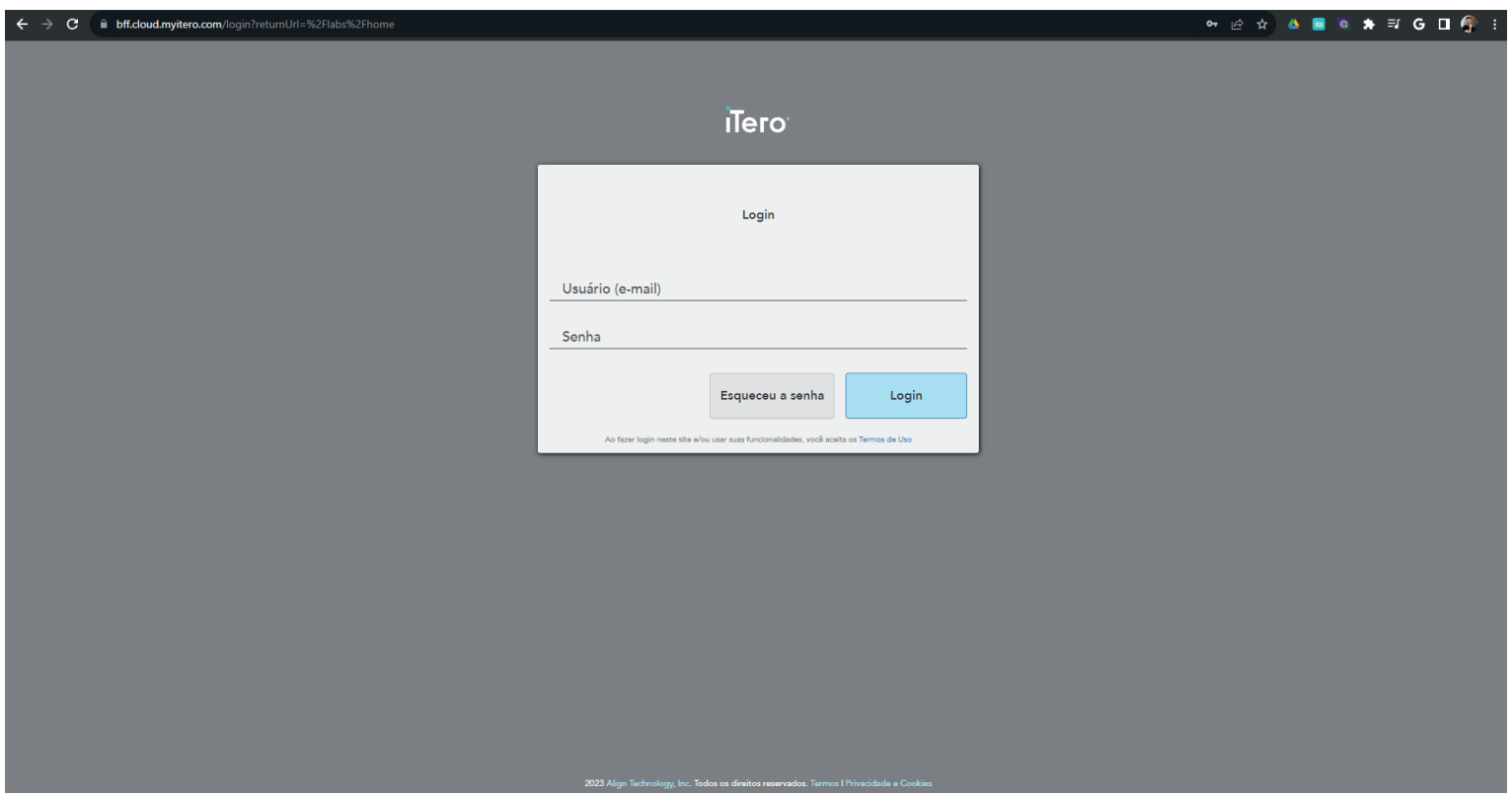


Abrir o site myitero.com

Rafael Aranha Cirurgião Dentista e Designer Técnico

✉ digital@lcaprotese.com.br ☎ 11 3819-2202


🖱 www.laboratoriodeprotese.com.br

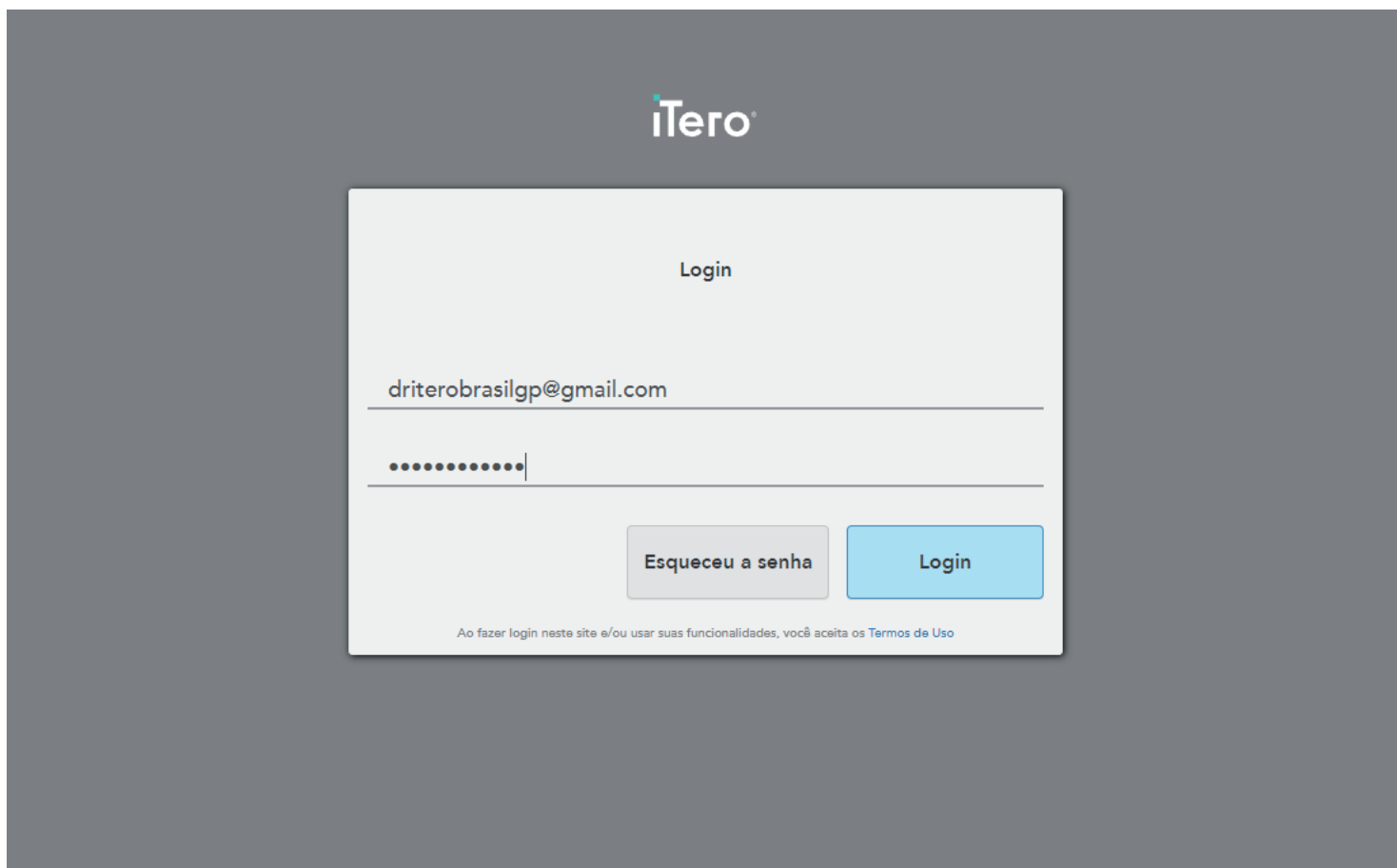

Fazer Login com seu usuario



Abrira essa Pagina

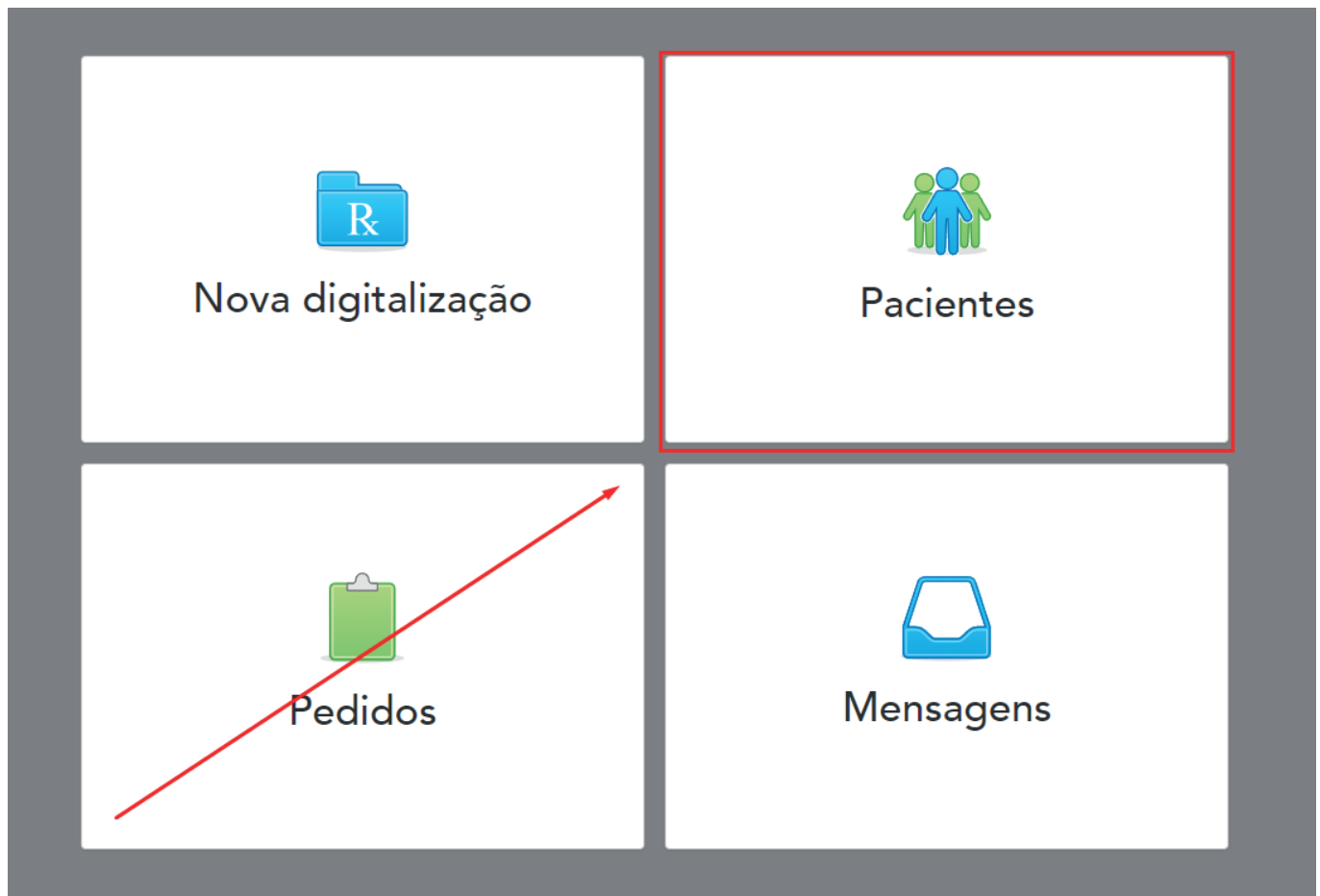


Clicar em Pacientes

Pesquisar pacientes

Nome ▲	N° de identificação	Data de nascimento	Data da última digitação
2, Test			14/02/2023
Adami, Emily			13/02/2023
Albarca, Adriana		01/05/1985	10/05/2023
Alves, Guilherme C		05/08/2000	15/03/2023
Bongiorni, Daniela	10459402838	11/11/1965	06/06/2023
Bussad, Igor	45435086884	18/06/1998	15/06/2023
Bussat, Sumaia	05146438897	06/06/1965	15/06/2023
Campos, Elisabete		31/03/1954	08/08/2023
Carvalho, Carlos			08/08/2023
Curso, Curso			
De Oliveira, Fabio		01/01/1990	
De Souza Filho, Luiz Carlos	13261235802	17/01/1971	15/06/2023
Estagiaria, Areska			13/02/2023
FERREIRA, JOAO			08/08/2023
Fidelis, Adriana		14/04/1979	14/03/2023
Forastiero, Suyanne			13/03/2023

Procurar o Paciente que
deseja exportar

Nome Do Paciente
Aranha, Eric 

Sexo
Masculino

[Nova digitalização](#)

ID	Data de digitalização	Tipo de caso	NIRI	Status
121657582	16/03/2023	iRecord	Sim	Concluído

Depois de Localizado abrir

Nome Do Paciente
Aranha, Eric

Sexo
Masculino

[Nova digitalização](#)

Pedidos

ID	Data de digitalização	Tipo de caso	NIRI	Status
121657582	16/03/2023	iRecord	Sim	Concluído

[Visualizar Ficha](#) [Alterar tipo de caso](#) [Visualizador](#) [Exportar](#) [Relatório do iTero Scan](#)

[Avaliação de Progresso Invisalign](#) [Avaliação de caso Invisalign Go](#) [Simulador de resultado Invisalign Go](#)

[OrthoCAD](#)

Aparecera essas opcoes



Nome Do Paciente
Aranha, Eric



Sexo
Masculino

Nova digitalização

Pedidos

ID	Data de digitalização	Tipo de caso	NIRI	Status
121657582	16/03/2023	iRecord	Sim	Concluído

Visualizar Ficha

Alterar tipo de caso

Visualizador

Exportar

Relatório do iTero Scan

Avaliação de Progresso Invisalign


Avaliação de caso Invisalign Go

Simulador de resultado Invisalign Go


OrthoCAD

Clicar em **EXPORTAR**




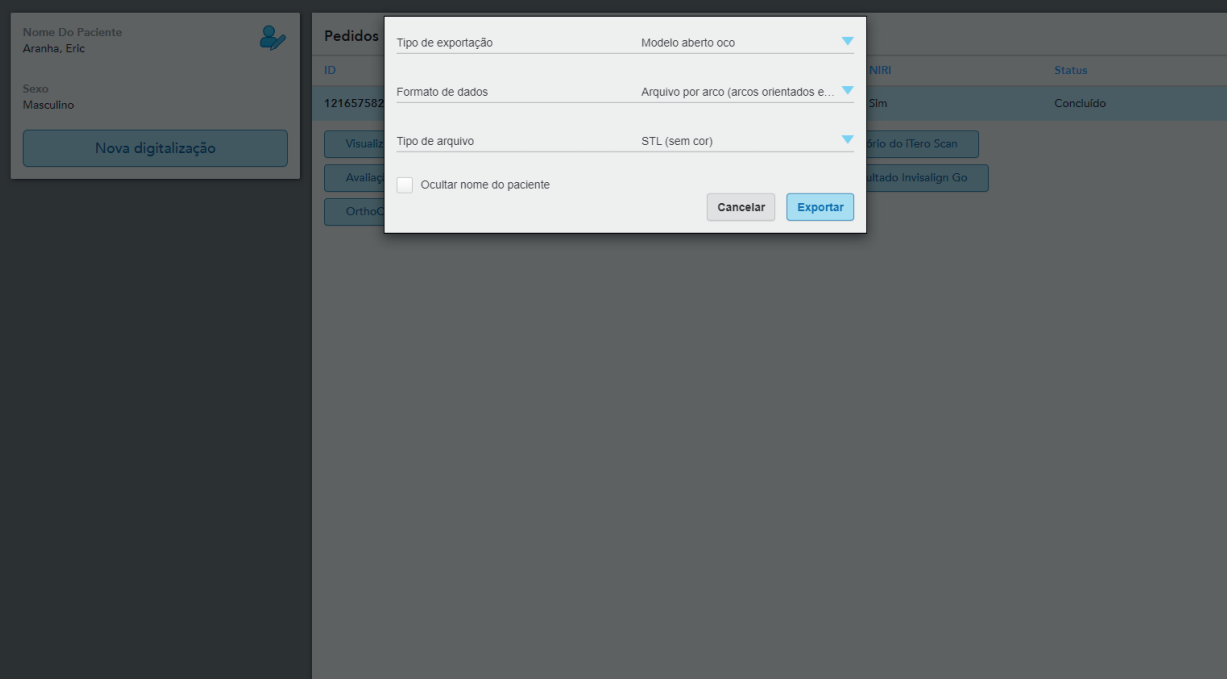


Abrira essa janela, ai preencha com
essas configuracoes

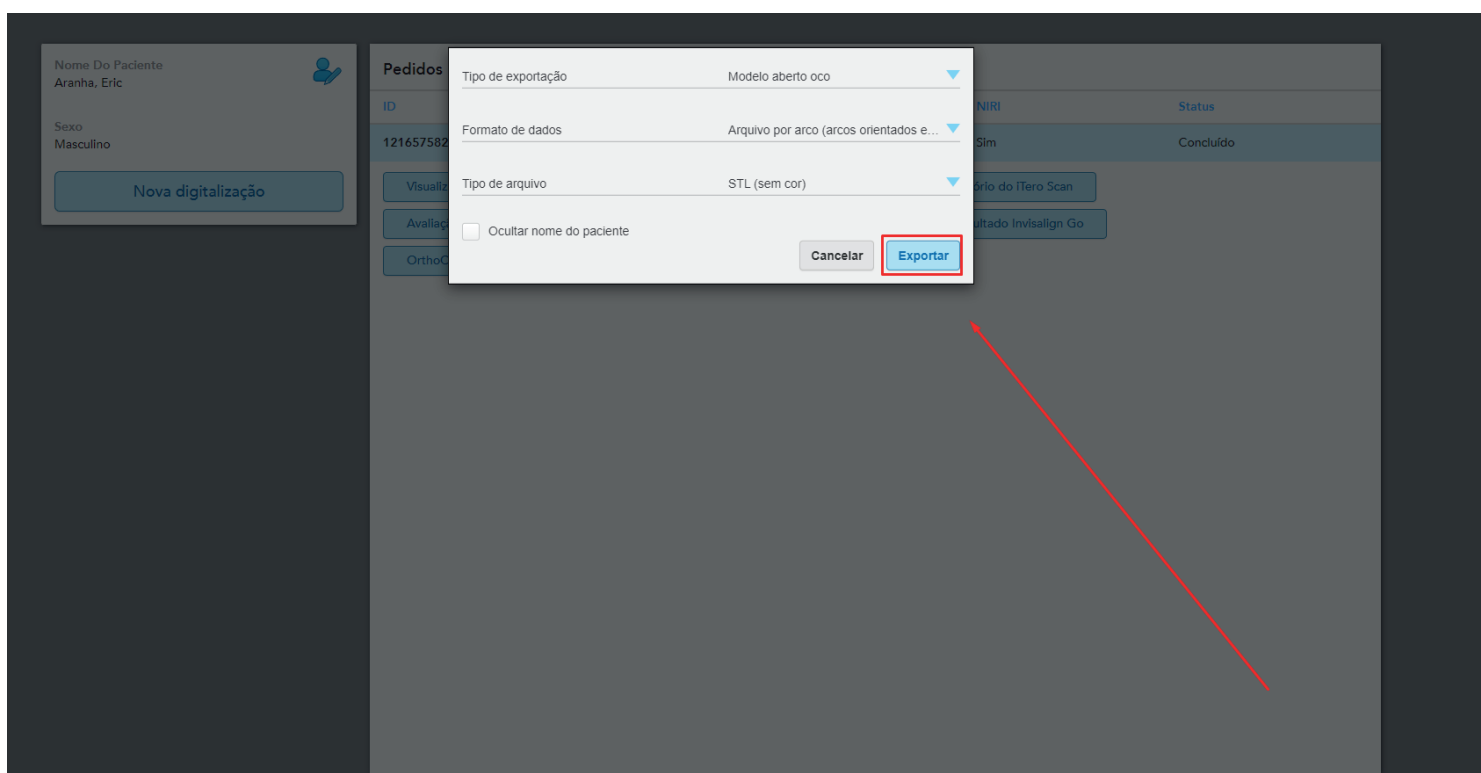


Depois Clicar em Exportar

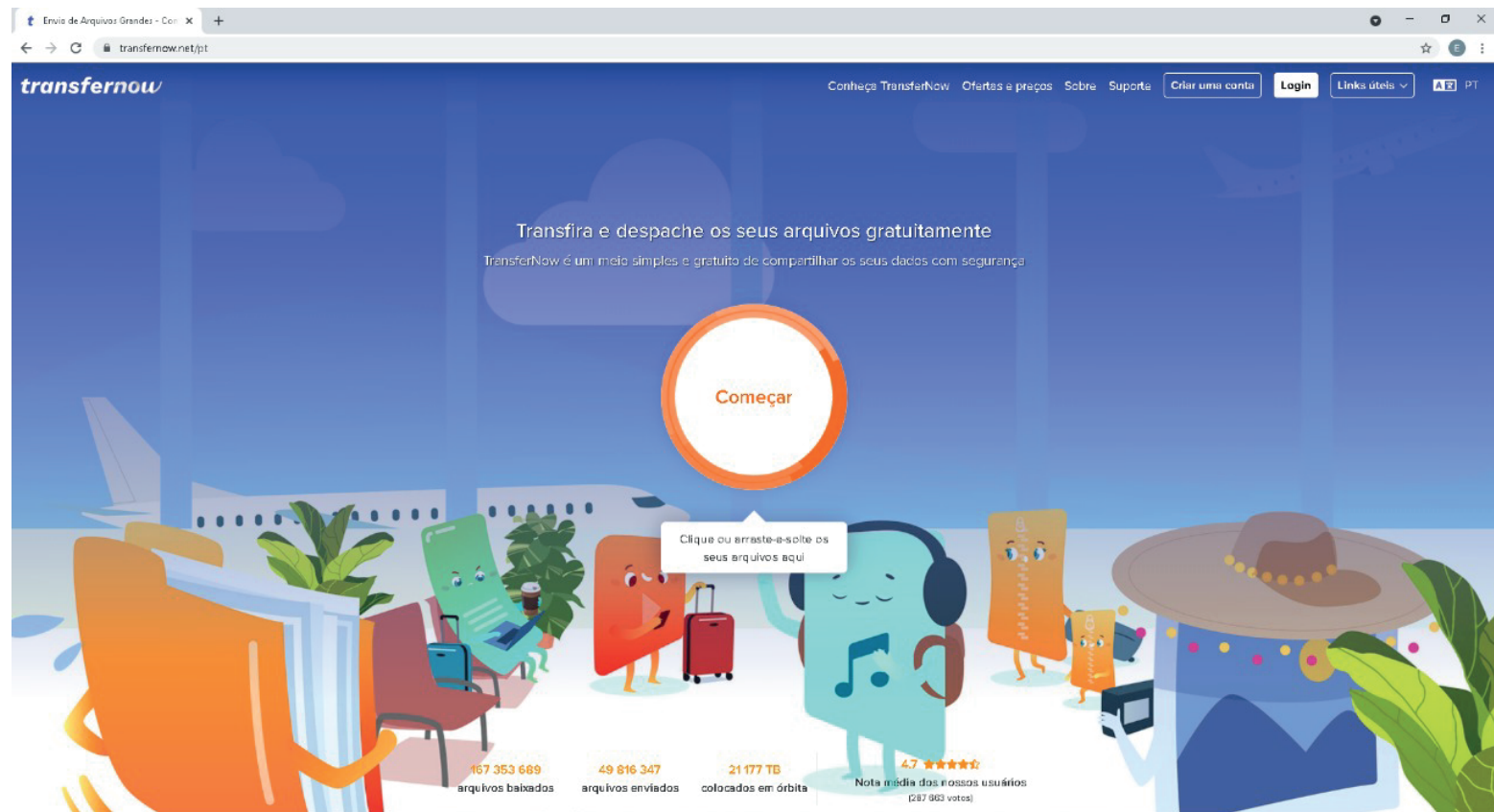


Abrir o site:
www.transfernow.net

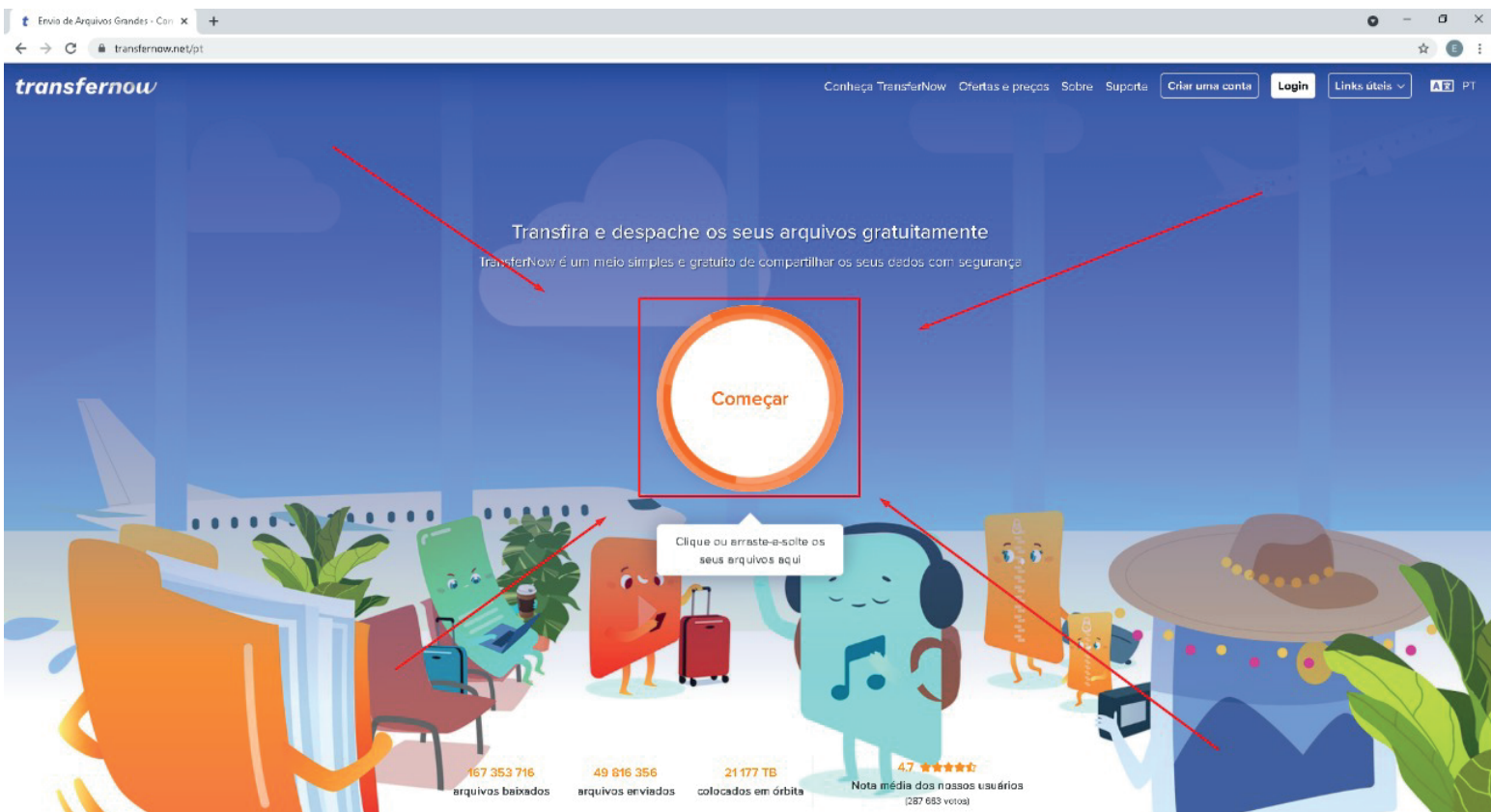


Clicar em Começar

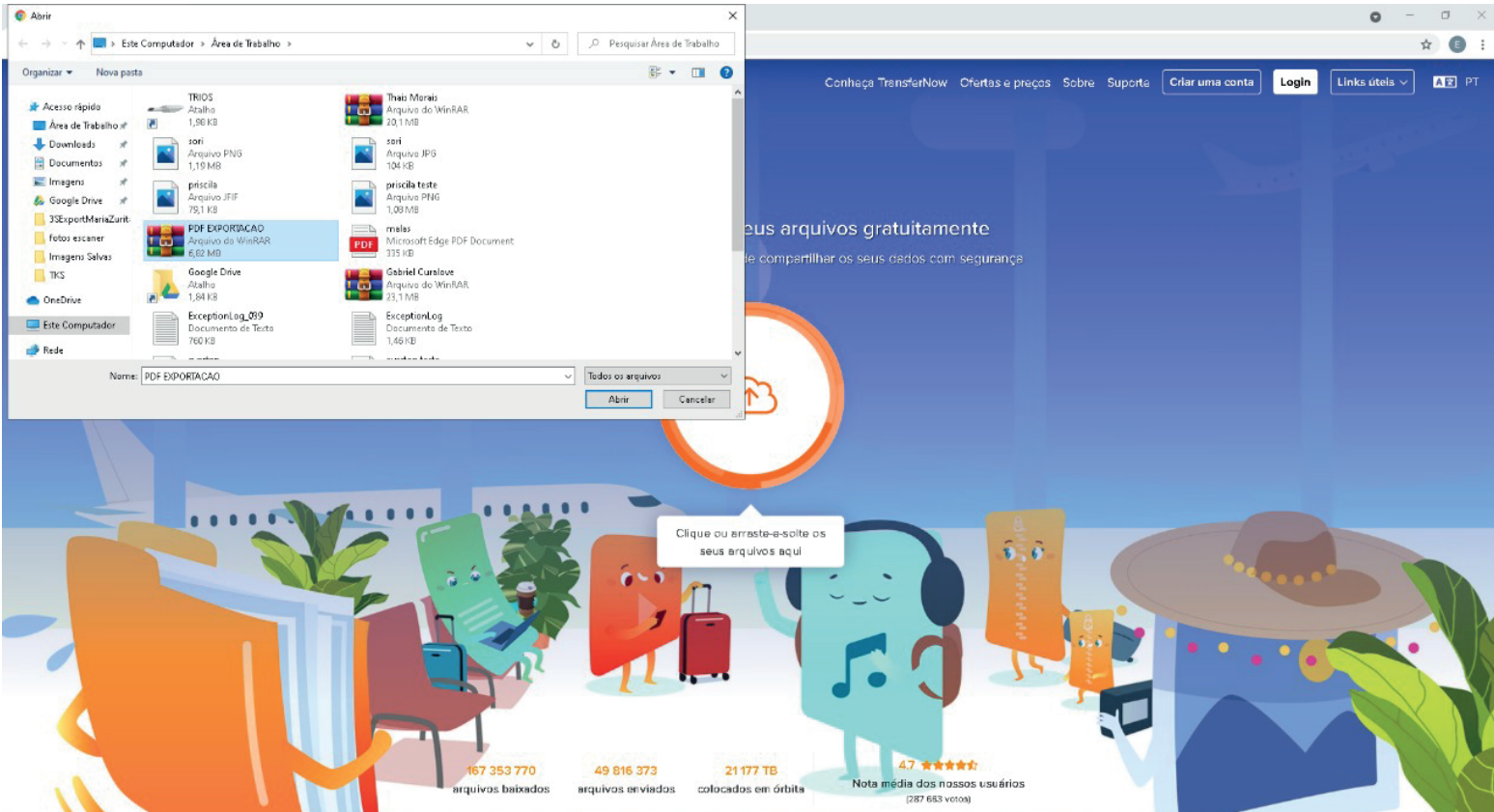


Localizar o arquivo que voce quer enviar

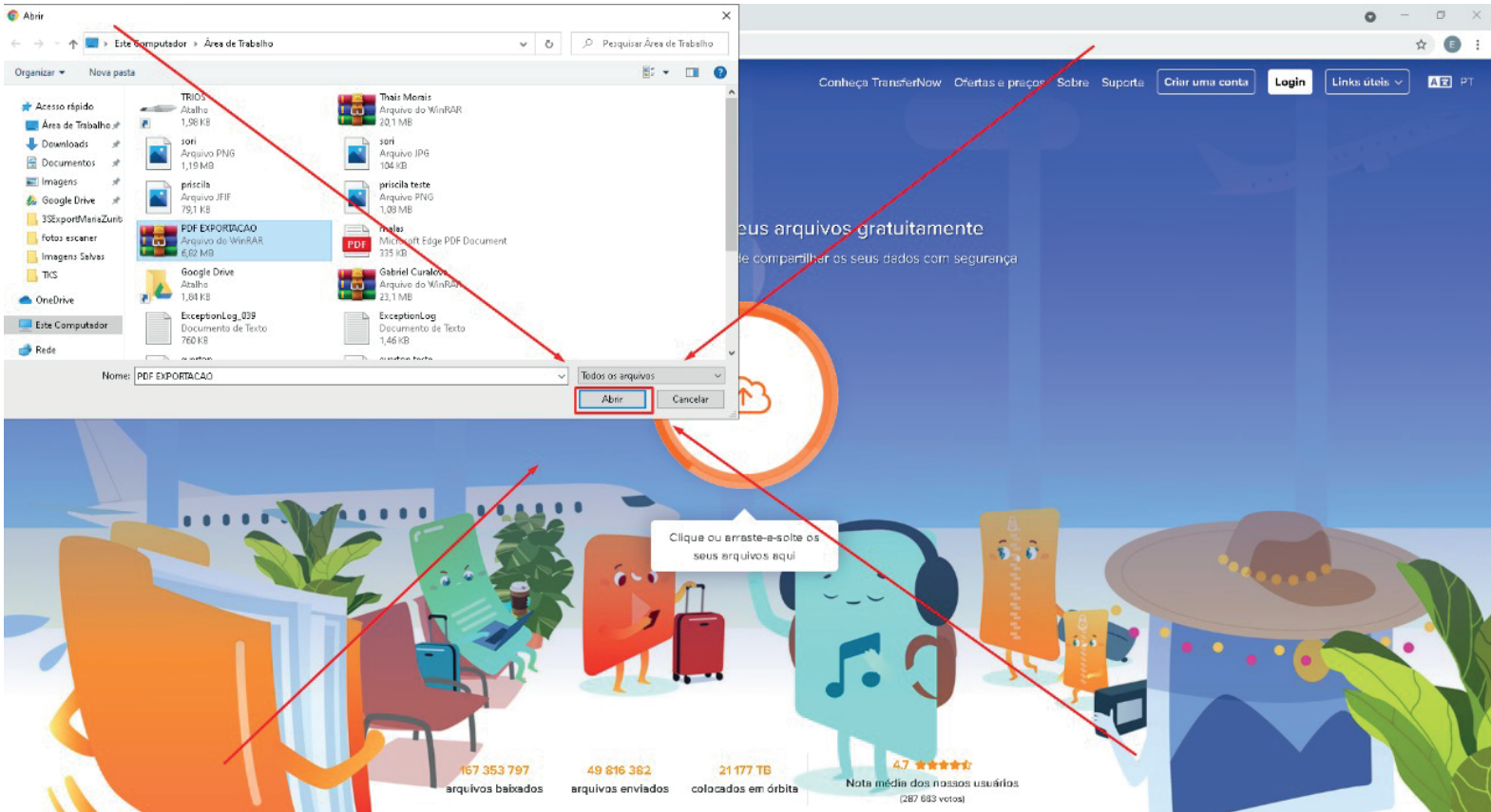


Depois de localizar clicar em abrir

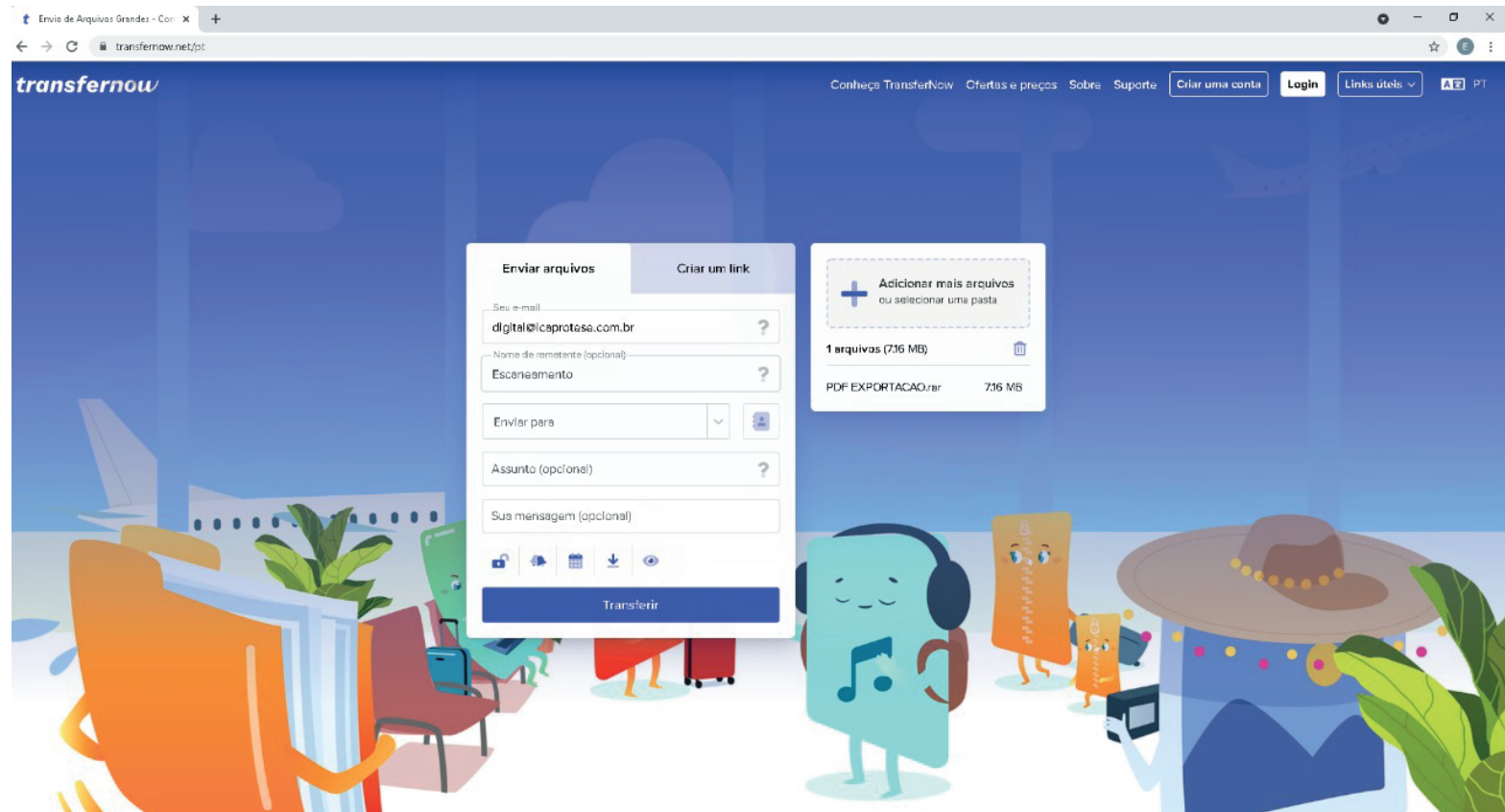


Ficará Assim

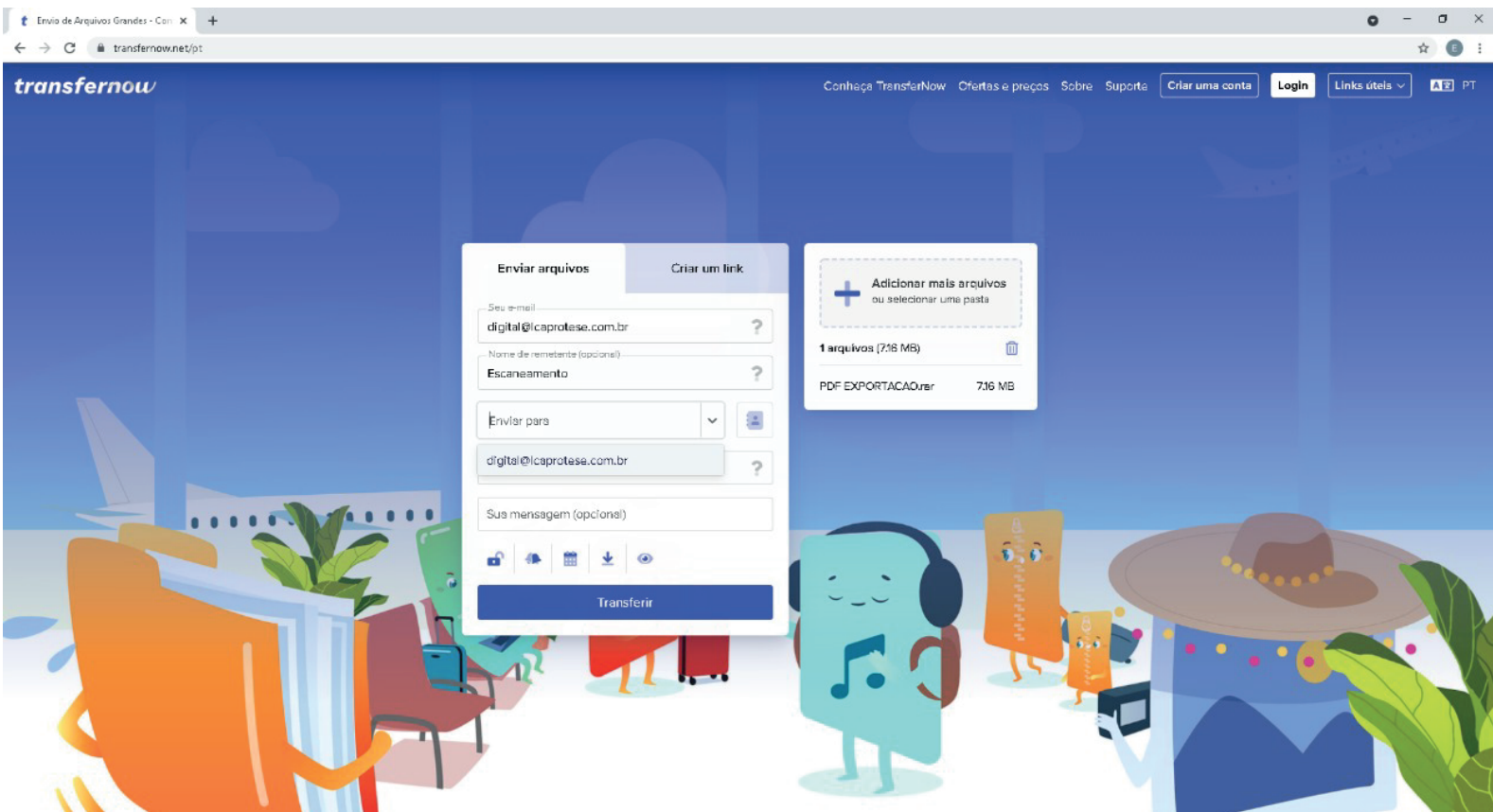


Clicar em enviar para
e colocar nosso email:
digital@lcaprotese.com.br

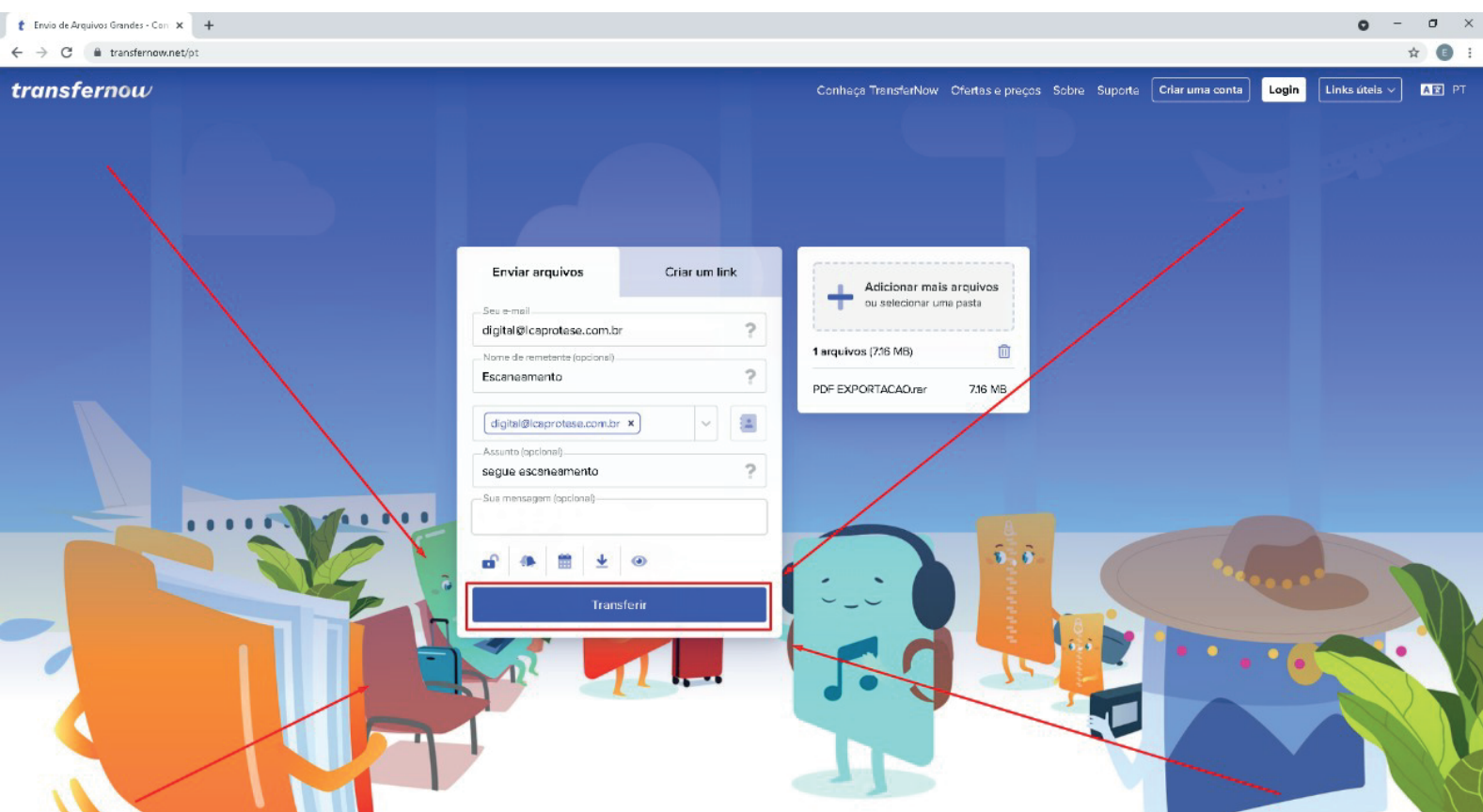

Depois de preencher o necessario
clicar em transferir

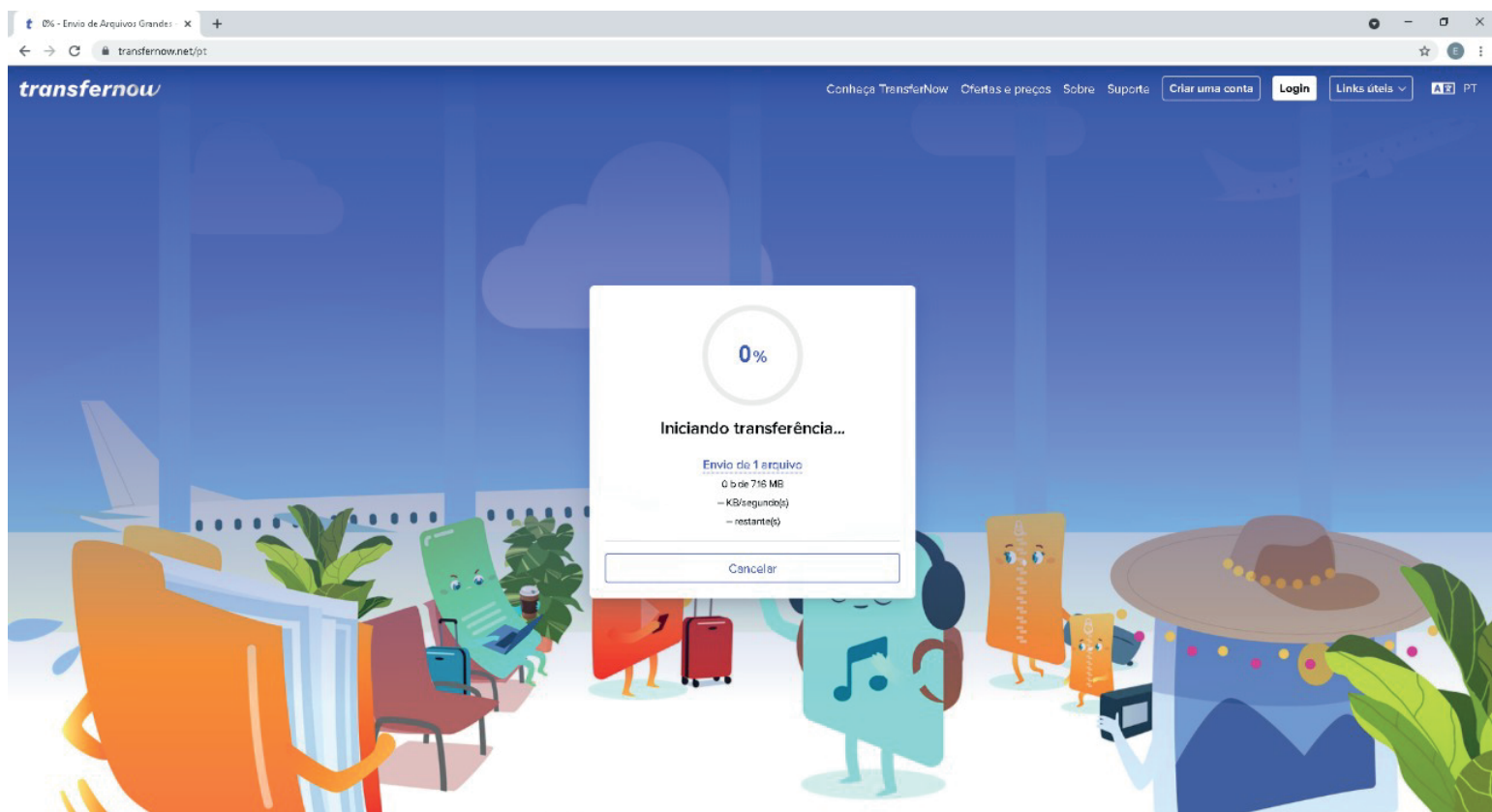

Aguardar carregar totalmente
a transferência do Arquivo

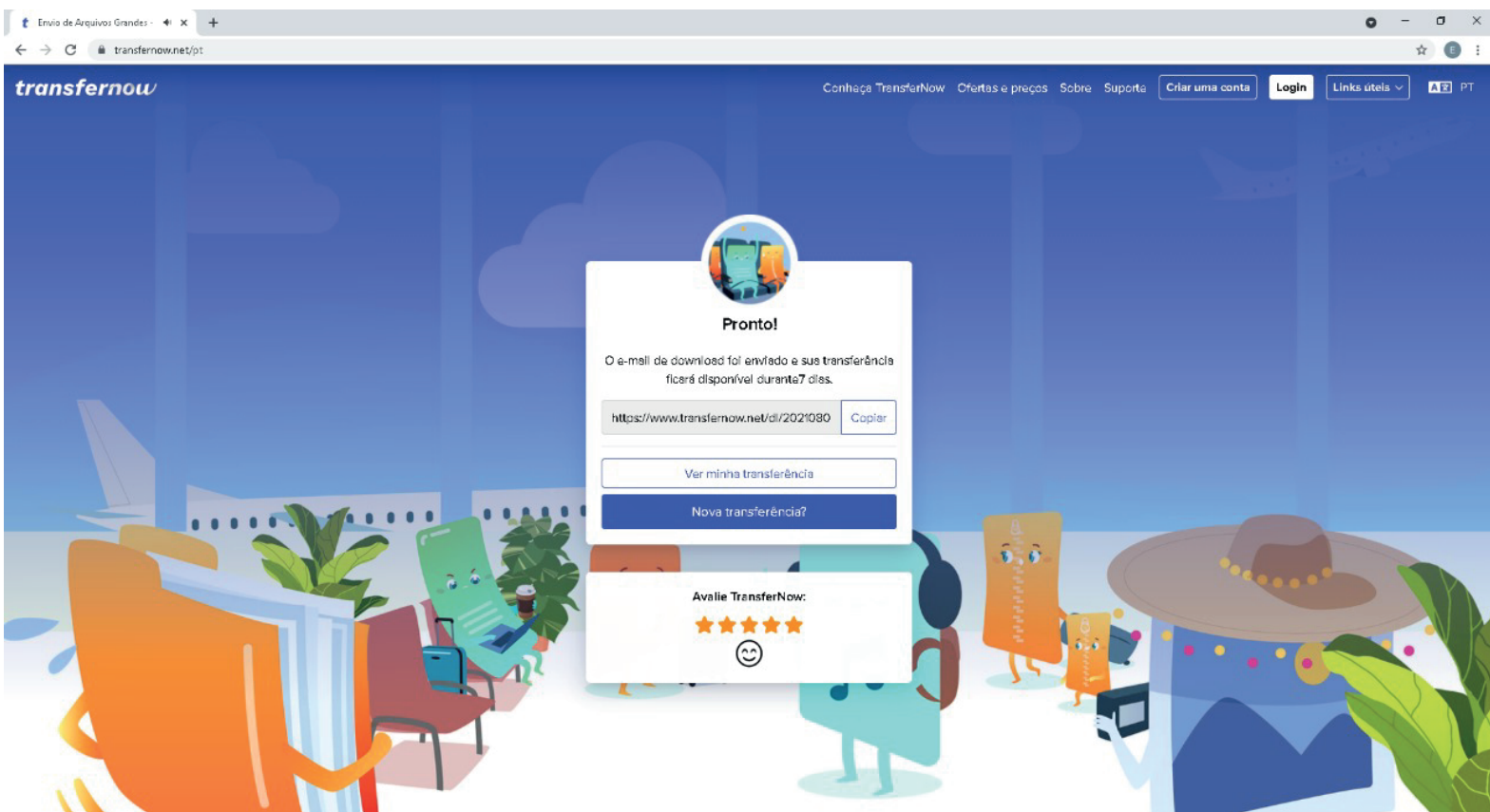

Pronto seu arquivo foi enviado!



**Clique nos ícones e nos
acompanhe nas redes sociais**



**Quer conhecer sobre nossas soluções em assessoria
técnica entre em contato conosco.**



OBRIGADO!